

PILBOX® 7

Le pilulier dynamique de grande contenance !

Accroché au mur ou posé sur la table de la cuisine, le semainier PILBOX® 7 est une aide indispensable pour suivre avec précision et facilement votre traitement à domicile ou en vacances. Vraiment simple à utiliser, il peut être facilement placé hors d'atteinte des enfants, pour une sécurité optimale.



A qui le conseiller ?

- ✓ Personnes sédentaires et/ou dépendantes, suivant un traitement composé d'un nombre important de médicaments (comprimés, gélules...)
- ✓ Idéal pour des pathologies telles que le cholestérol, diabète, hypertension, cancer, compléments alimentaires...

Les + produit

- ✓ **Pratique** : un système de rangement ingénieux. Une fois les médicaments pris, le module utilisé se range sur le dessus et le module du jour suivant se positionne automatiquement en bas du pilulier.
- ✓ **Robuste et de grande contenance** : les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés.
- ✓ **Système d'accroche murale** : s'accroche au mur pour rester à portée de main.
- ✓ **Un suivi précis** de votre traitement grâce aux 7 modules et jusqu'à 4 prises par jour.

Caractéristiques

- **Pilulier semainier de grande taille** : 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module. Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard.
- **Module journalier amovible** qui se transporte facilement.
- **Système de fermeture « spécial voyage »** : une languette bloque la sortie des modules.
- **Manipulation facile, sécurité jour/nuit** : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et des médicaments de nuit (souvent des somnifères). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.
- **Remplissage facile en une fois.**
- **Adapté aux malvoyants** : repères sensoriels pour indiquer chaque prise.



Ouverture facile



Pas de contact avec les médicaments



Ouverture facile pour le remplissage



Prendre le module du jour et le placer en haut



Ranger le module, le jour suivant est déjà prêt



fiche technique

- ✓ **Dimensions** :
Etui : 15 x 13 cm, 5 cm
Module : 13 x 4 cm, 2 cm
Compartiment : 3 x 3.7 cm, 2 cm
- ✓ **Disponible en vrac ou en présentoir** de 3 unités

Prix de vente public conseillé : 23 € TTC

Plus d'infos sur pilbox.com