



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

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
CEINTURE BIRDY INTÉGRALE

POUR TOUS FAUTEUILS



Périmètre maximum utile : + 220 cm
Boucle : 50 mm

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne. Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position. Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
Tour de taille (en cm)



CBRIN2HP-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.02/23

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



CEINTURE BIRDY INTÉGRALE

Composition
Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon
Épaulières à mousse thermocompressée

1. Passer la tête du patient dans le baudrier à bretelles.
2. Glisser la ceinture Birdy dans le dos du patient au niveau des lombaires et ajuster les passants sur chaque hanche.
3. Passer l'extrémité de la ceinture sous la cuisse légèrement soulevée.
4. Répliquer l'opération sur la deuxième cuisse.
5. Passer chaque boucle dans le passant afférent.
6. Ajuster la ceinture abdominale avec son auto-agrippant.
7. Insérer la boucle double dans la sangle de dos.
8. Fermer la boucle au dos du fauteuil.
9. Ajuster au dos les deux boucles arrières du baudrier.

