

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes mobiles permettant de transférer une personne en position debout.
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

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
SANGLE DE VERTICALISATEUR ECO



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.
Le réglage d'accroche se fait sans tension avec les bras du patient positionnés à 120°. Cette sangle est en taille unique.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



SXPECO2-PF-TU

v 05.02/23

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable d'ajuster au mieux le produit sur le patient.
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE DE VERTICALISATEUR ÉCO

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

TU	A	105
	B	19

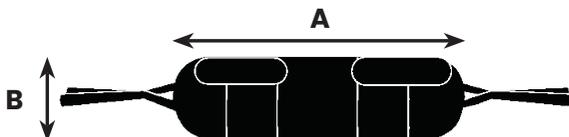

Composition

Jersey 100% polyester

Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN

Mousse PE 50 kg/m³

Mousse polyuréthane 18 kg/m³

Biais polyester 20 mm

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

Positionner le bas du dossier au niveau des lombaires afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne.

Accrocher les deux attaches du dossier aux crochets du releveur mobile.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du releveur mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le releveur mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.