



Lavabo Ropox Support

Fixe – Basique - Manual

MANUEL




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Conservez ce manuel avec le produit en tout temps


Contenu:

1.SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL	3
2.SÉCURITÉ GÉNÉRALE	3
2.1 ÉTIQUETTE DE L'UNITÉ DE PRODUIT.....	5
3.EXIGENCES GÉNÉRALES	6
3.1 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT.....	6
3.2 UTILISATION PRÉVUE.....	7
3.3 OPÉRATEUR PRÉVU.....	7
3.4 RENDEMENT ESSENTIEL.....	7
3.5 FONCTIONS NON CLINIQUES.....	7
3.6 FONCTIONS CLINIQUES.....	7
3.7 DIMENSIONS DU PRODUIT.....	7
3.8 OPÉRATION.....	9
4.INSTRUCTION DE MONTAGE	11
4.1 INTERFACES D'INSTALLATION.....	11
4.2 ADAPTATEURS DE CONNEXION.....	15
4.3 LISTE DES COMPOSANTS.....	16
4.4 INSTALLATION DU PRODUIT.....	18
5.ESSAI DE PERFORMANCE	39
6.SÉCURITÉ D'UTILISATION	39
7.SERVICE ET MAINTENANCE	40
7.1 NETTOYAGE.....	40
7.2 NETTOYAGE DU DESSUS DE TABLE ET DU LAVABO.....	40
7.3 INSPECTION.....	40
7.4 CALENDRIER DE SERVICE.....	41
8.RECHERCHE DE DÉFAUT	41
9.LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	42
10.PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	42
11.PLAINTE	43

1. Symboles utilisés dans ce manuel

Symbole d'avertissement Indication d'une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves ou la mort.	
Symbole de mise en garde Indication d'une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées. Il peut également être utilisé pour alerter contre les pratiques dangereuses.	
Symbole de notification Ce symbole est utilisé pour signaler l'utilisation et la manipulation correctes du produit.	

2. Sécurité générale

	<p>Ce manuel doit être lu et compris avant utilisation. Conservez toujours ce manuel à proximité du produit.</p> <p>L'utilisation, l'installation et l'entretien de ce produit doivent être conformes à ce manuel afin d'éviter les accidents et les blessures graves.</p> <p>N'utilisez ou ne manipulez jamais ce produit d'une autre manière spécifiée dans ce manuel, car cela pourrait entraîner des risques pour la sécurité personnelle et/ou endommager le produit.</p> <p>Les personnes qui installent et/ou utilisent ce produit en tant qu'opérateur ou utilisateur doivent disposer des informations de sécurité nécessaires et avoir accès à ce manuel.</p> <p>Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes désignées qualifiées de la même manière afin d'éviter tout danger.</p>



N'effectuez pas de réparations, de démontage ou d'opérations de montage, d'ajouts, de réajustements ou de modifications du produit au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Ceux-ci doivent être effectués par Ropox ou le personnel autorisé Ropox. N'effectuez pas de service pendant l'utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utilisez pas le produit s'il présente des défauts ou s'il a été endommagé avant d'être réparé ou remplacé.
Si le boîtier de commande émet un bruit ou des odeurs inhabituels, coupez immédiatement la tension secteur.

Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés.

Débranchez le câble secteur de l'équipement mobile avant de le déplacer.

Les produits ne doivent être utilisés que dans un environnement correspondant à leur protection de la propriété intellectuelle.



Les informations contenues dans ce manuel sont basées sur une installation correcte conformément aux instructions d'installation de ce produit.

Ropox ne peut être tenu responsable si le produit est utilisé d'une manière qui diffère de celle indiquée dans ce manuel et/ou les instructions d'installation.

Ropox se réserve le droit de modifier ce manuel et les documents de référence sans préavis.

2.1 Étiquette de l'unité de produit

 2021-12
REF 40-440 1 4-1 **SN** N45-0001

Lavabo
 Lavabo Ropox Support, Manuel, L
 Poignées intégrées.

Charge maximale: 400kg Masse du produit:











57075810010QVN45-0001

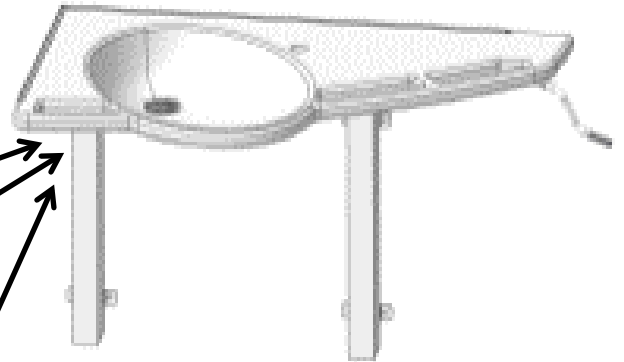ROPOX WEB.: www.ropox.dk
 Ropox A/S,
 Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved
 TLF: +45 5575 0500, E-mail: Info@ropox.dk

 40°
 -5°  80%
 Transport & storage

	<p>Ce produit est marqué CE conformément à:</p> <p>Règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux</p> <p>Directive 2006/42/CE du Conseil relative aux machines</p> <p>Directive 2011/65/UE du Conseil, RoHS</p>
	<p>Nom et adresse du fabricant</p>
	<p>Date de production</p>
REF	<p>Numéro de stock</p>
SN	<p>Matricule</p>
	<p>Consultez le manuel pour obtenir des renseignements importants sur la sécurité, des mises en garde et des mesures de sécurité.</p>
	<p>Ne pas éliminer les déchets municipaux non triés. Le produit doit être retourné à une station de recyclage désignée.</p>
	<p>Les températures de fonctionnement et de stockage ne doivent pas dépasser 5-40C°</p>
	<p>Consultez le mode d'emploi</p>

3. Exigences générales

3.1 Informations sur le produit

Fabricant:	Ropox A/S Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 Info@ropox.com		
Modèles de produits	Numéro de pièce	Modèle	Configuration
	40-44010	Supportvask	Fixe L
	40 – 440 11	Supportvask	R fixe
	40 – 44012	Supportvask	Base L
	40 – 44013	Supportvask	R de base
	40 – 44014 40 – 44015	Supportvask Supportvask	Manuel L Manuel R
Durée de vie prévue	5 ans		
Classe MDR 2017/745	Catégorie I		
Réglage de la hauteur	Basique = 71-101cm Manuel = 71-101cm		
Poids maximal utilisateur selon ISO 17966:2016	400 kg / 881 lb		
Plage de température ambiante	-10 °C à +50 °C Transport et stockage Fonctionnement de +5 °C à +40 °C		
Humidité réelle	20 % à 85 % - sans condensation		
Matériel en contact avec le patient	Lavabo	Composite synthétique/marbre	
	Cadre Mitigeur	Tuyaux d'acier soudés St. 37, aluminium Chrome	
Environnements prévus	Ce produit ne doit être utilisé que dans : Environnement professionnel Healthcare Environnement de soins à domicile		
Accessories	40-40935	Bouchon avec débordement	
	40-44021	Plaques de recouvrement laissées, pour Fixe et Basic	
	40-44022	Plaques de couverture droite, pour Fixe et Basic	
	40-44027	Plaques de recouvrement laissées, pour Manuel	
	40-44028	Plaques de couverture droite, pour Manuel	
	40-44020	Kit de plomberie pour manuel	
	40-44033 40-44040	Kit de plomberie pour fixe et basique Mitigeur	

3.2 Utilisation prévue

Le lavabo de soutien est particulièrement adapté aux personnes à mobilité réduite car vous pouvez utiliser les barres d'appui ergonomiques intégrées comme support et comme aide lorsque vous vous levez ou vous asseyez. Le lavabo est disponible avec une hauteur fixe et avec réglage de la hauteur. Il est possible de choisir entre le réglage manuel ou électrique de la hauteur. Cela le rend capable de convenir à l'utilisateur individuel qui utilisera le lavabo.

3.3 Opérateur prévu

La lecture et la compréhension de ce manuel constitueront une formation suffisante pour un opérateur prévu. Les enfants de moins de 16 ans ou le patient ne sont pas considérés comme des opérateurs prévus.

3.4 Performances essentielles

Le produit n'a pas de performances essentielles, car le patient et l'utilisateur ne courent aucun risque en cas de perte de fonction/performance du produit.

3.5 Fonctions non linéaires

Le réglage en hauteur offre une meilleure ergonomie à l'utilisateur.

3.6 Fonctions cliniques


Le produit n'a aucune fonction clinique.

3.7 Dimensions du produit

Fixe


40-4400 1/1 1

(Mixertap aAccès)

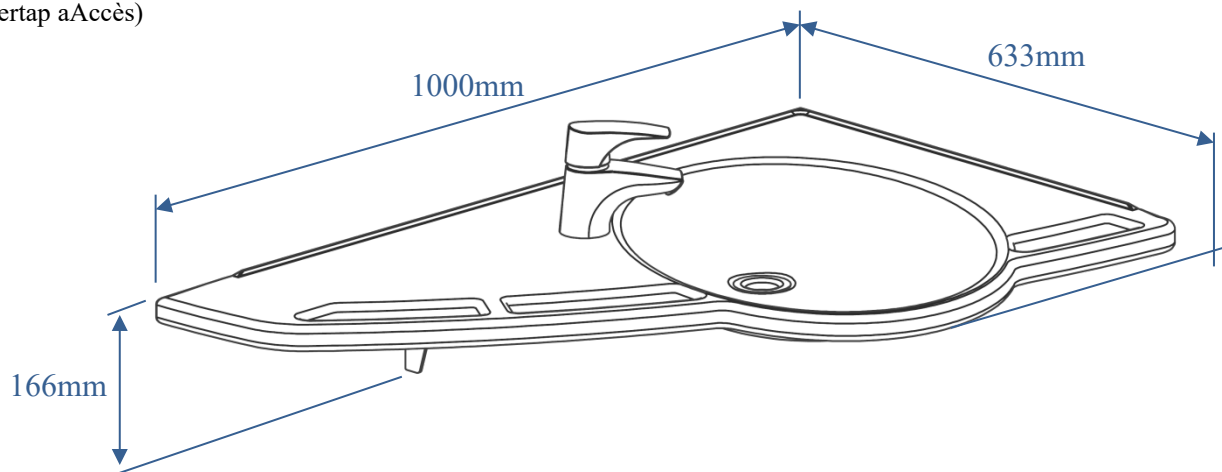


Réglage de base de la hauteur
40-440 12/13

(Mixertap aAccès)

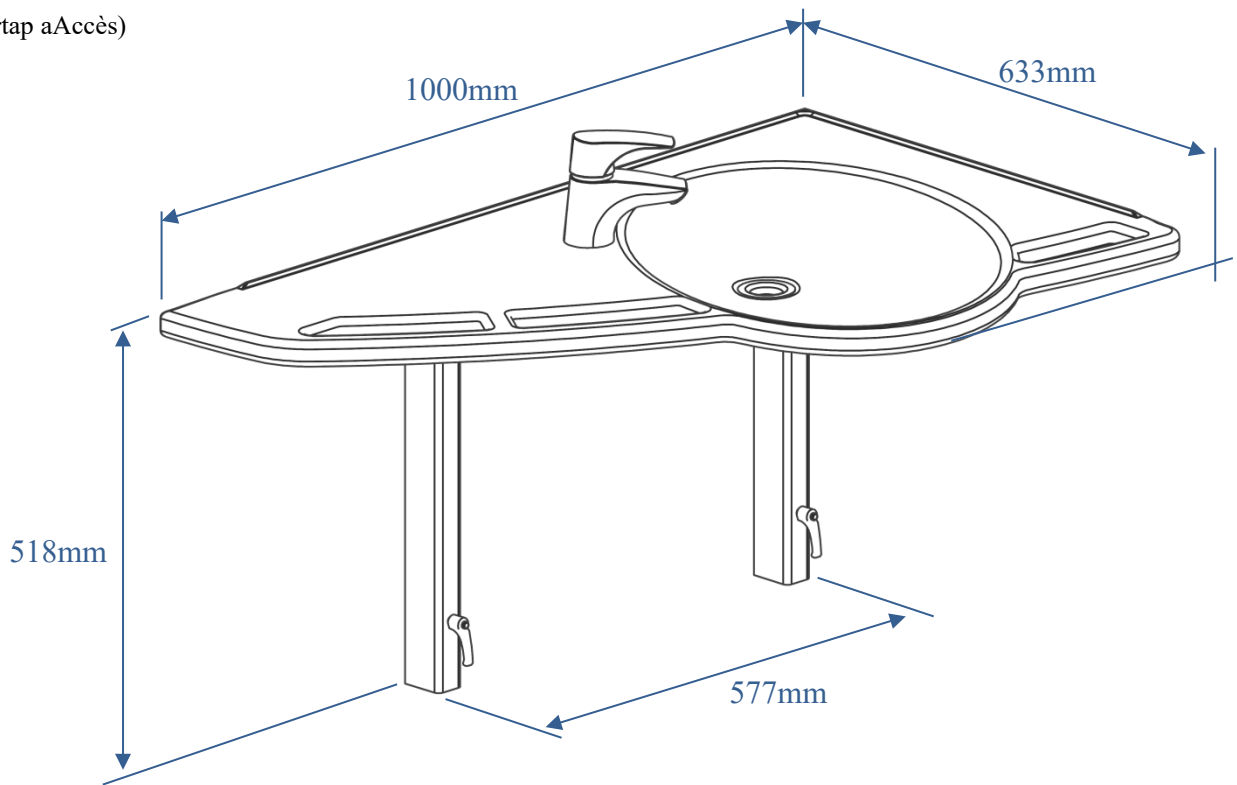


Manual hEIGHt ajustement
40-44004/05

(Mixertap accessories)

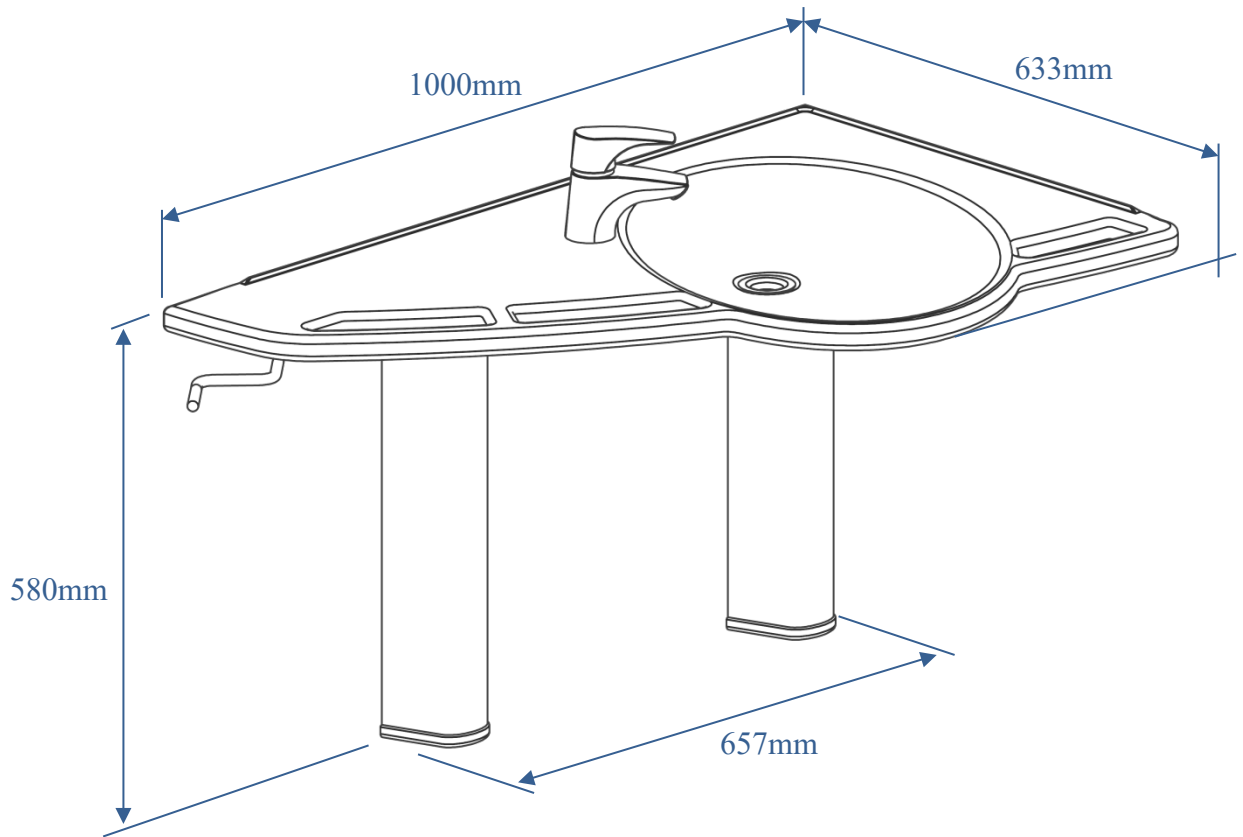


Accessoires – couvertures
40-44021/22

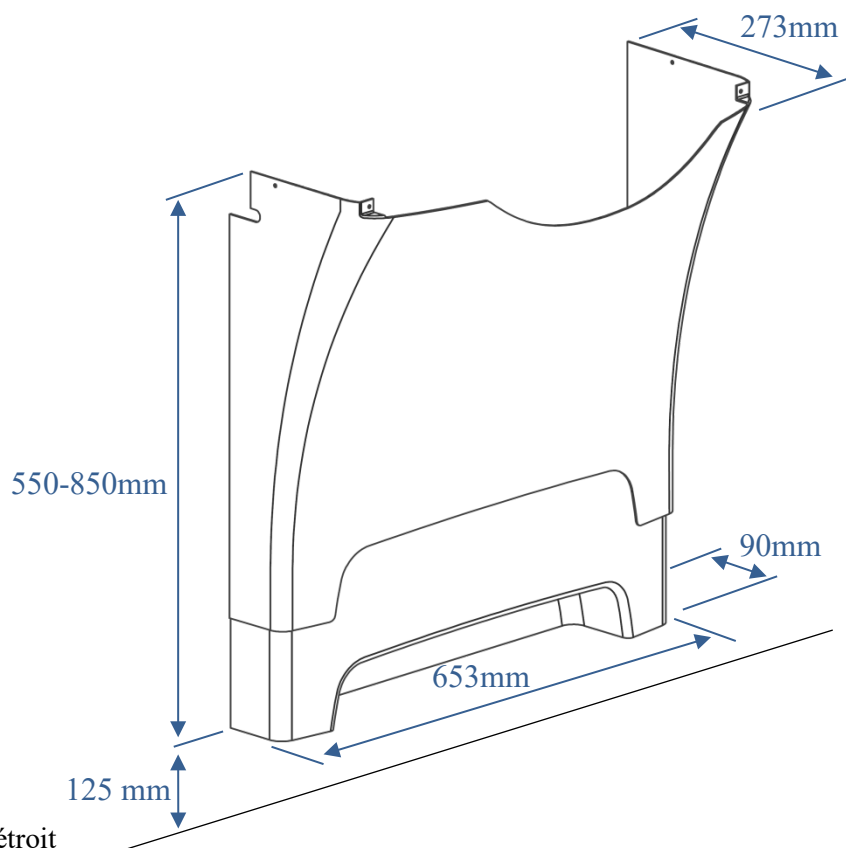

3.8 Opération


Réglage de base en hauteur (s'appliquant à 40-440 12/13)

La hauteur du lavabo peut être ajustée en desserrant les deux poignées. Notez que le lavabo doit être soutenu lors du desserrage de la poignée afin d'éviter qu'il ne tombe en position inférieure. Les couvercles, le cas échéant, doivent être retirés avant le réglage de ces modèles.

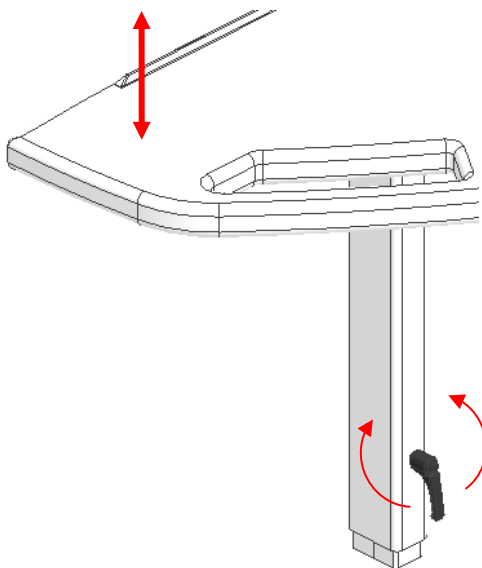

Réglage manuel de la hauteur (applicable à 40-440 1 4/15):

La hauteur du lavabo peut être facilement ajustée au moyen de la manivelle amovible.

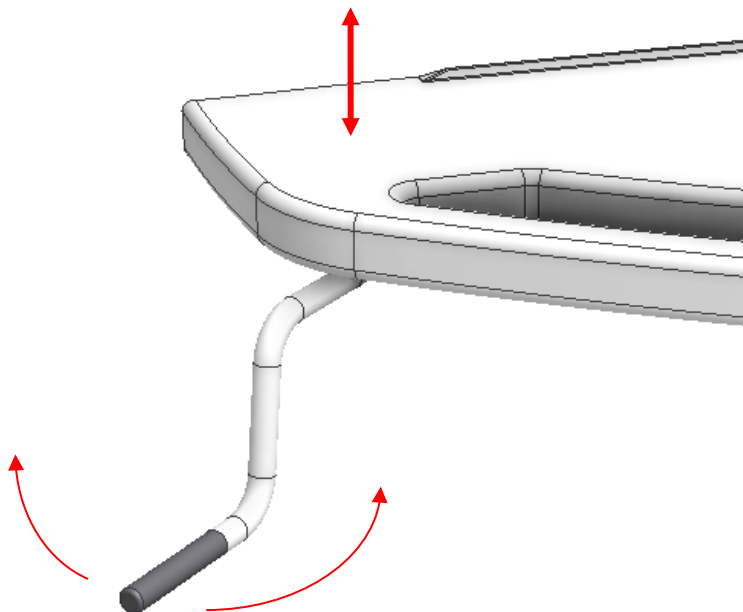

Avertissement!

Le produit doit toujours pouvoir parcourir toute la gamme d'actionnements sans entrer en collision avec des objets. Ne pas le faire compromettra la stabilité du produit et introduira un risque de compression des parties du corps.

Des précautions particulières doivent être prises pour s'assurer qu'aucun enfant ou adulte ne se trouve sous le produit, car des blessures graves peuvent survenir à la suite d'un piégeage.

4. Instructions de montage

4.1 Interfaces d'installation

Fixe (40-440 1 0 et 40-440 1 1)

CONSTRUCTION

Le mur doit être fait d'un matériau adapté au montage par vis et approuvé pour les pièces humides. La zone hachurée est la surface minimale pour le renforcement du mur. Un renforcement du sol au plafond est conseillé.

Essai de charge d Conformément à la norme DS/ISO 1 7966, le poids maximal de l'utilisateur a été fixé à 400 kg (88 1lb).

Max. traction load des vis supérieures
150kg/vis (330 lbs)



Le lavabo est fourni avec un jeu de 6 vis et bouchons adaptés au montage sur un mur en béton. Le monteur doit toujours tenir compte du matériau, de l'état et de la résistance du mur et utiliser des vis et des bouchons adaptés au type de mur spécifique.

PLOMBERIE

Le drain est Ø32 (1 1/4 ») et se termine par un Ø32x88. 5° Vidangez le coude. La saillie maximale du raccord de vidange et du coude du mur est de 90 mm (3 1/2 po) pour permettre les couvercles.

L'alimentation en eau se termine par 2 (deux) vannes d'arrêt à 90° avec filetage extérieur de 1/2 » pointant vers le bas (non inclus).

La saillie maximale des vannes d'arrêt du mur est de 90 mm (3 1/2 ») pour permettre les couvercles.

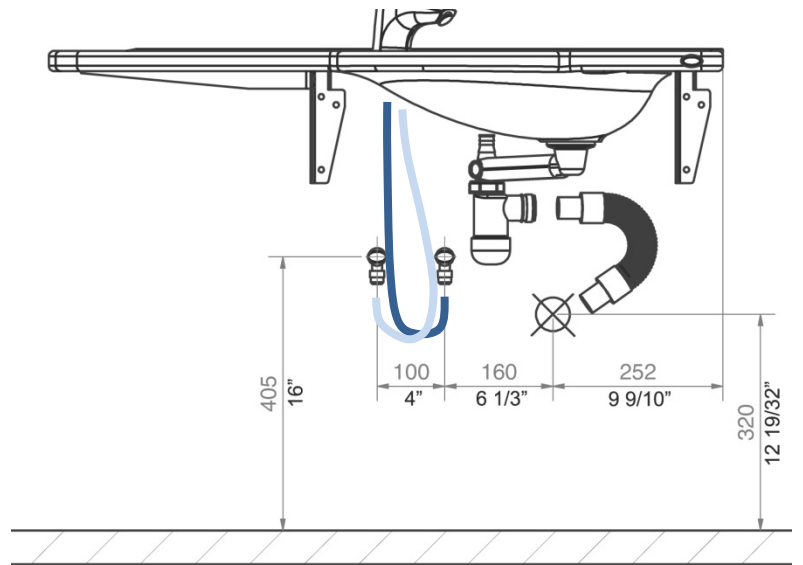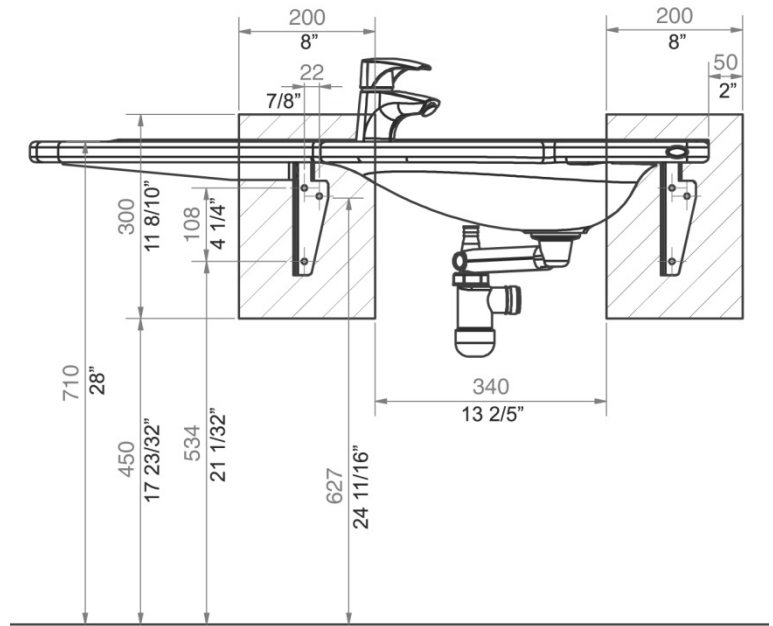


Si un emplacement de l'alimentation en eau et du drain différent du positionnement recommandé est requis ou s'il y a un drain de sol, le lavabo de soutien n'aura pas de couvercles.
Pour l'achat d'adaptateurs pour la connexion à diverses installations standard, voir « Adaptateurs de connexion – Autres lavabos ».

NOTE:

Toutes les dimensions sont basées sur une hauteur de lavabo de 710mm (28») au-dessus du niveau du sol. Si une modification de cette hauteur est nécessaire, les dimensions recommandées doivent être modifiées en conséquence.

Les illustrations montrent le modèle de gauche 40-44010

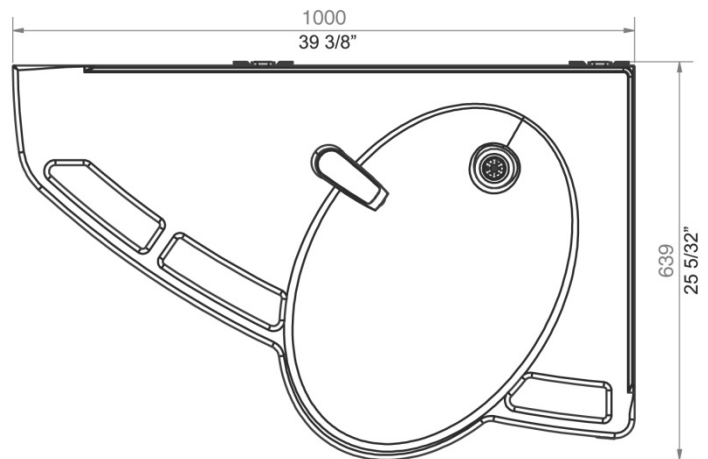

Basique (40-440 1 2 et 40-44013)

CONSTRUCTION

Le mur doit être fait d'un matériau adapté au montage par vis et approuvé pour les pièces humides.

La zone hachurée est la surface minimale pour le renforcement du mur.

Un renforcement du sol au plafond est conseillé.

Testé sous charge : Conformément à la norme DS/ISO 17966, le poids maximal de l'utilisateur a été fixé à 400 kg (881 lb).

Max. traction load des vis supérieures
85kg/vis (187 lbs)

Le lavabo est fourni avec un jeu de 6 vis et bouchons adaptés au montage sur un mur en béton. Le monteur doit toujours tenir compte du matériau, de l'état et de la résistance du mur et utiliser des vis et des bouchons adaptés au type de mur spécifique.

PLOMBERIE

Le drain est Ø32 (1 1/4 ») et se termine par un Ø32x88. 5° Vidangez le coude.

La saillie maximum du raccord de vidange et du coude du mur est de 90 mm (3 1/2 ») pour permettre les couvercles.

L'alimentation en eau se termine par 2 (deux) vannes d'arrêt à 90° avec filetage extérieur de 1/2 » pointant vers le bas (non inclus).

La saillie maximale des vannes d'arrêt du mur est de 90 mm (3 1/2 ») pour permettre les couvercles.




Il est important que tous les tuyaux pour le raccordement et le drain d'eau soient flexibles pour permettre au cadre de se déplacer librement dans la plage de réglage en hauteur de 710-1010mm (28 » – 39 8/10 ») (y compris le lavabo).

Si un emplacement d'alimentation en eau et de vidange différent du positionnement recommandé est nécessaire ou s'il y a un drain de sol, le lavabo de soutien n'aura pas de couvercles.

Pour l'achat d'adaptateurs pour la connexion à diverses installations standard, voir « Adaptateurs de connexion – Autres lavabos ».

NOTE:

Les illustrations montrent le modèle de gauche 40-44012

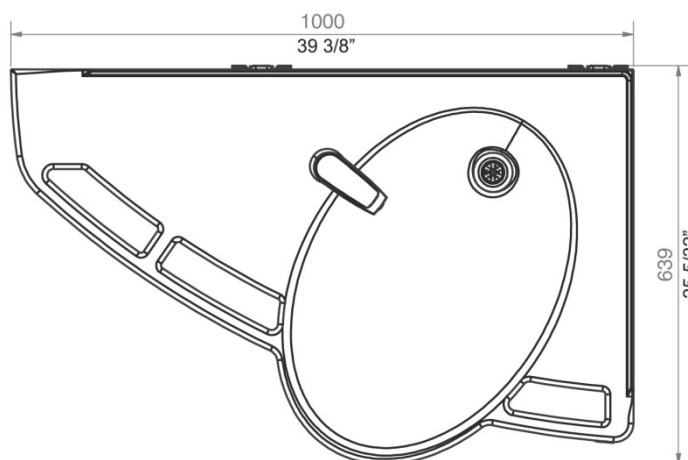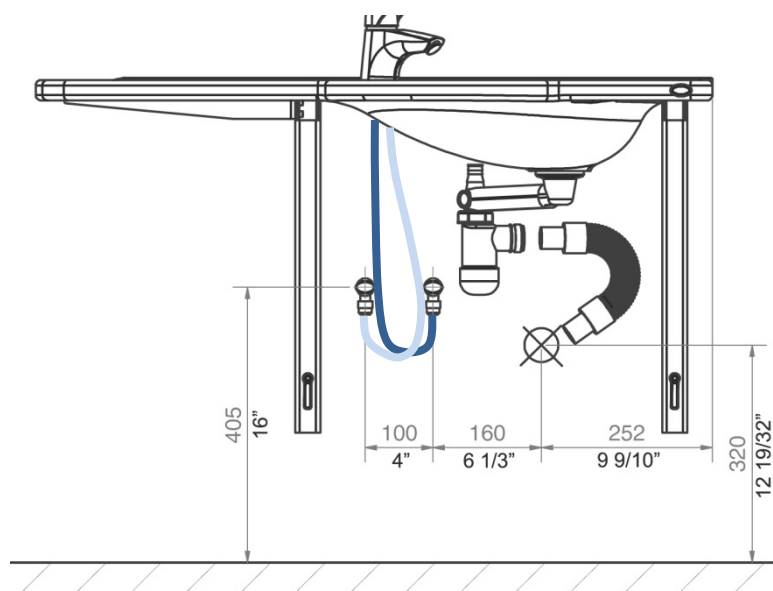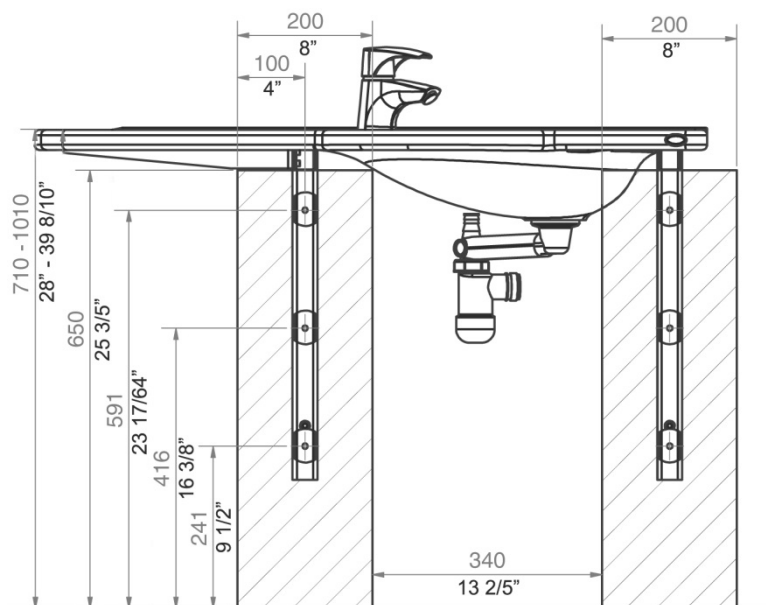

Manuel (40-440 1 4 et 40-44015)

CONSTRUCTION

Le mur doit être fait d'un matériau adapté au montage par vis et approuvé pour les pièces humides.

La zone hachurée est la surface minimale pour le renforcement du mur. Un renforcement du sol au plafond est conseillé.

Testé sous charge : Conformément à la norme DS/ISO 17966, le poids maximal de l'utilisateur a été fixé à 400 kg (881 lb).

Charge de traction maximale des vis supérieures

71kg/vis (157 lbs)

Le lavabo est fourni avec un jeu de 8 vis et bouchons adaptés au montage sur un mur en béton. Le monteur doit toujours tenir compte du matériau, de l'état et de la résistance du mur et utiliser des vis et des bouchons adaptés au type de mur spécifique.

PLOMBERIE

Le drain est Ø32 (1 1/4 ») et se termine par un coude de drain Ø32x88,5°.

La saillie maximale du raccordement du coude du mur est de 90 mm (3 1/2 po) pour permettre les couvercles.




L'alimentation en eau se termine par 2 (deux) vannes d'arrêt à 90° pointant vers le bas (non incluses). La saillie maximale des vannes d'arrêt du mur est de 90 mm (3 1/2 ») pour permettre les couvercles

Il est important que tous les tuyaux pour le raccordement et le drain d'eau soient flexibles pour permettre au cadre de se déplacer librement dans la plage de réglage en hauteur de 710-1010mm (28 » – 39 8/10 ») (y compris le lavabo).

Si un emplacement d'alimentation en eau et de vidange différent du positionnement recommandé est nécessaire et s'il y a un drain de sol, le lavabo de soutien n'aura pas de couvercles.

Pour l'achat d'adaptateurs pour la connexion à diverses installations standard, voir « Adaptateurs de connexion – Autres lavabos ».



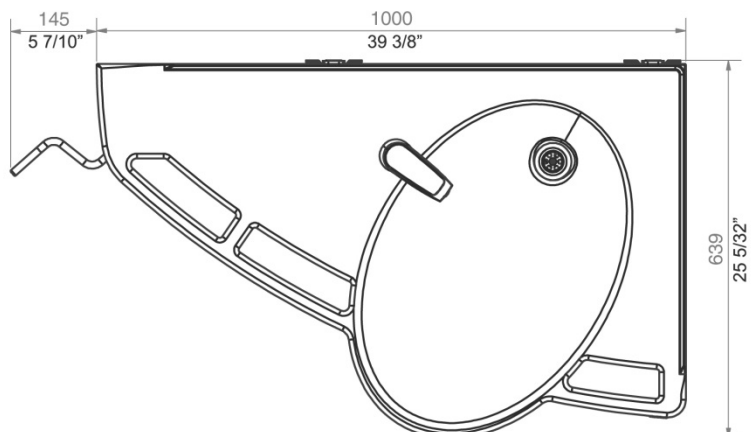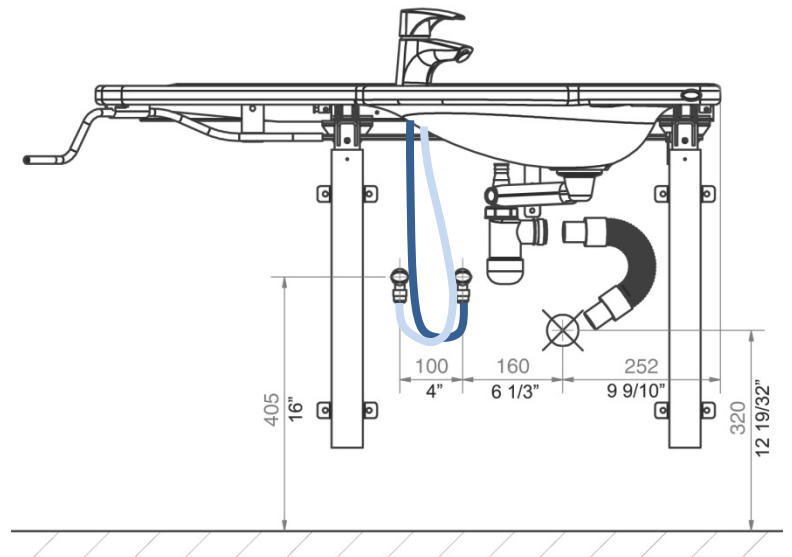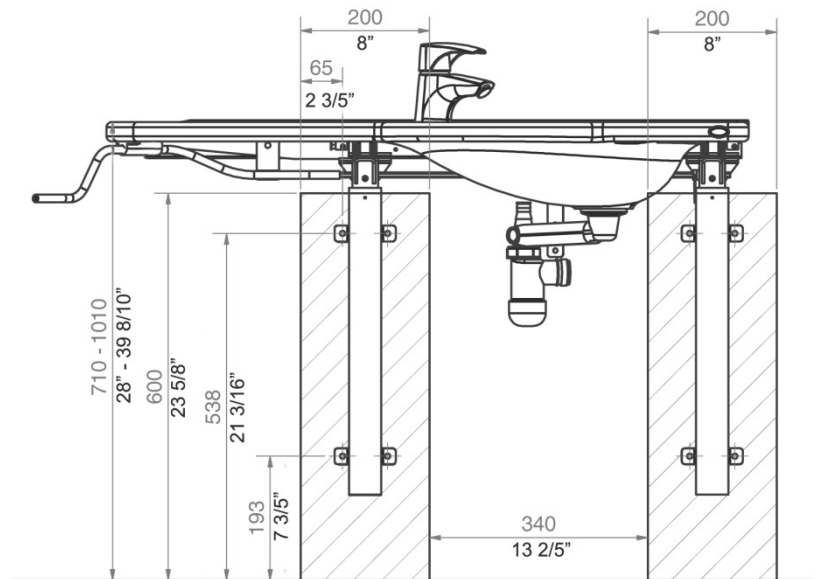



NOTE: Les illustrations montrent le modèle de gauche 40-44014







4.2 Adaptateurs de connexion

Les composants mis en évidence peuvent être achetés séparément en fonction du type d'exigences d'installation du bâtiment.







Approvisionnement en eau

Tuyaux du bassin	Adaptateurs	Installation en chambre (non incluse)
 1/2"	Aucun adaptateur nécessaire	 Filetage 1/2 »
	 1/2 » -> 3/8 » N° d'article 97001670	 Filetage 3/8 »
	 1/2 » -> 15mm Article N° 97001666	 Tuyau de 15 mm


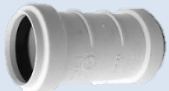


Extensions de tuyaux d'eau

Tuyau du bassin	Pièce d'accouplement	Exentre le tuyau
	 1/2 » -> 1/2 » Article N° 97001662	 1/2 » x 1/2 », 0,5m, acier Article n° 97001123
		 1/2 » x 1/2 », 1m, plastic Article no. 97001120

Aspirer

Tuyau de drainage du bassin	Adaptateurs	Installation en chambre (non incluse)
 Ø32	Aucun adaptateur nécessaire	 Ø32
	 Ø32 -> Ø40 N° d'article 97001660	 Ø40
	 Ø32 -> Ø50 N° d'article 97001661	 Ø50

Rallonges de tuyaux de drainage

Tuyau de drainage du bassin	Pièce d'accouplement	Tuyau de vidange supplémentaire
 Ø32	 Ø32-Ø32 N° d'article 97001662	 Tuyau Ø32 Flex, 27-62cm Article n° 97001162
		 Tuyau Ø32 Flex, 40-110cm Article n° 97001161

4.3 Liste des composants

Ropox Support Washbasin, Fixed, gauche, 40-44010:


40 * 44010-064: Plaque supérieure avec lavabo, orientée à gauche 1 (une)

Fourni avec :

40 * 44010-063: Support mural fixe, long 1 (un)

40 * 44010-062: Support mural fixe, court 1 (un)

40 * 44010-048: Cadre B support latéral ASIC 1 (un)

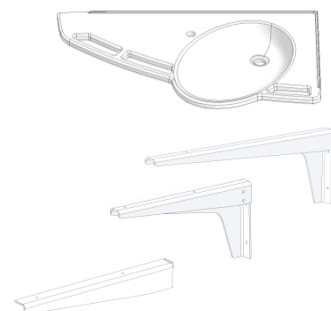

Lavabo Ropox Support, Fixed, droite, 40-44011:


40 * 44010-070: Plaque supérieure avec lavabo, orientée à droite 1 (un)

Fourni avec :

40 * 44010-063: Support mural fixe, long 1 (un)

40 * 44010-062: Support mural fixe, court 1 (un)

40 * 44010-048: Cadre B support latéral ASIC 1 (un)

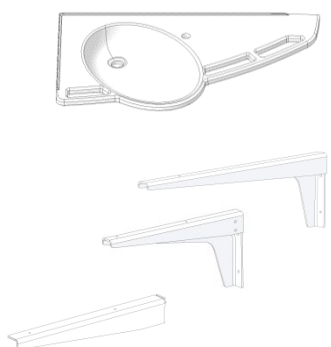

Lavabo de soutien Ropox, réglage de base de la hauteur, gauche, 40-44012:

40 * 44010-064: Plaque supérieure avec lavabo, orientée à gauche 1 (une)

Boîtiers de réglage de la hauteur de base 1 (un) jeu

Incl.

40*44010-025 Support long


40*44010-026 Crochet court

40 * 44010-020 Injambes latérales

97800-022 Tôle filetée

97001631 Poignées réglables

40 * 44010-048 Support latéral ASIC B

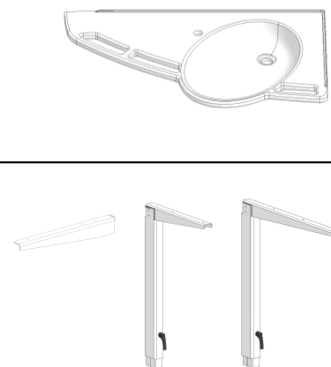

Lavabo Ropox Support, réglage de base en hauteur, à droite, 40-44013:

40 * 44010-070: Plaque supérieure avec lavabo, orientée à droite 1 (une)

Supports de réglage de base en hauteur 1 (un)

Incl.

40*44010-025 Support long


40*44010-026 Crochet court

40 * 44010-020 Injambes latérales

97800-022 Tôle filetée


97001631 Poignées réglables

40 * 44010-048 Support latéral ASIC B

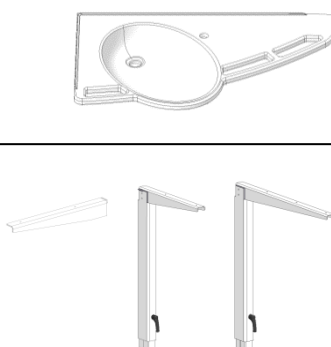

Lavabo Ropox Support, réglage manuel de la hauteur, gauche, 40-44014:

40 * 44010-064: Plaque supérieure avec lavabo, orientée à gauche1 (une)

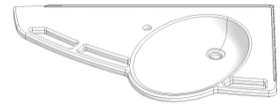

Fourni avec :

Cadre supérieur, orienté vers la gauche1 (un)

Incl.

40 * 44010-042Support manuel de cadre , gauche


40*44010-057Ensemble manivelle gauche



30-67600: Jambes flexibles, Manual2 (deux) séries

Incl.Cover

Blocs de distance

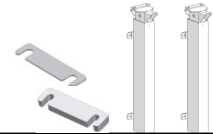

40*44010-038: Arbre hexagonal1 (un)




20*60320-548: Manivelle 1 (une)



Lavabo Ropox Support, réglage manuel de la hauteur, à droite, 40-44015:

40 * 44010-070: Plaque supérieure avec lavabo, orientée à droite1 (une)

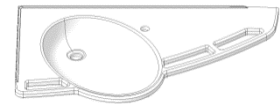

Fourni avec :

Cadre supérieur, orienté vers la droite1 (un)

Incl.

40 * 44010-077Frame Support manuel , à droite


40*44010-082Ensemble manivelle, droite



30-67600: Jambes flexibles, Manual2 (deux) séries

Couvrir

Blocs de distance

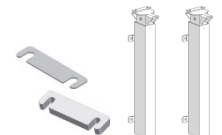

40*44010-038: Arbre hexagonal1 (un)




20*60320-548: Manivelle 1 (une)






4.4 Installation du produit

4.4.1 Lavabo de soutien, fixe (40-44010/1 1)


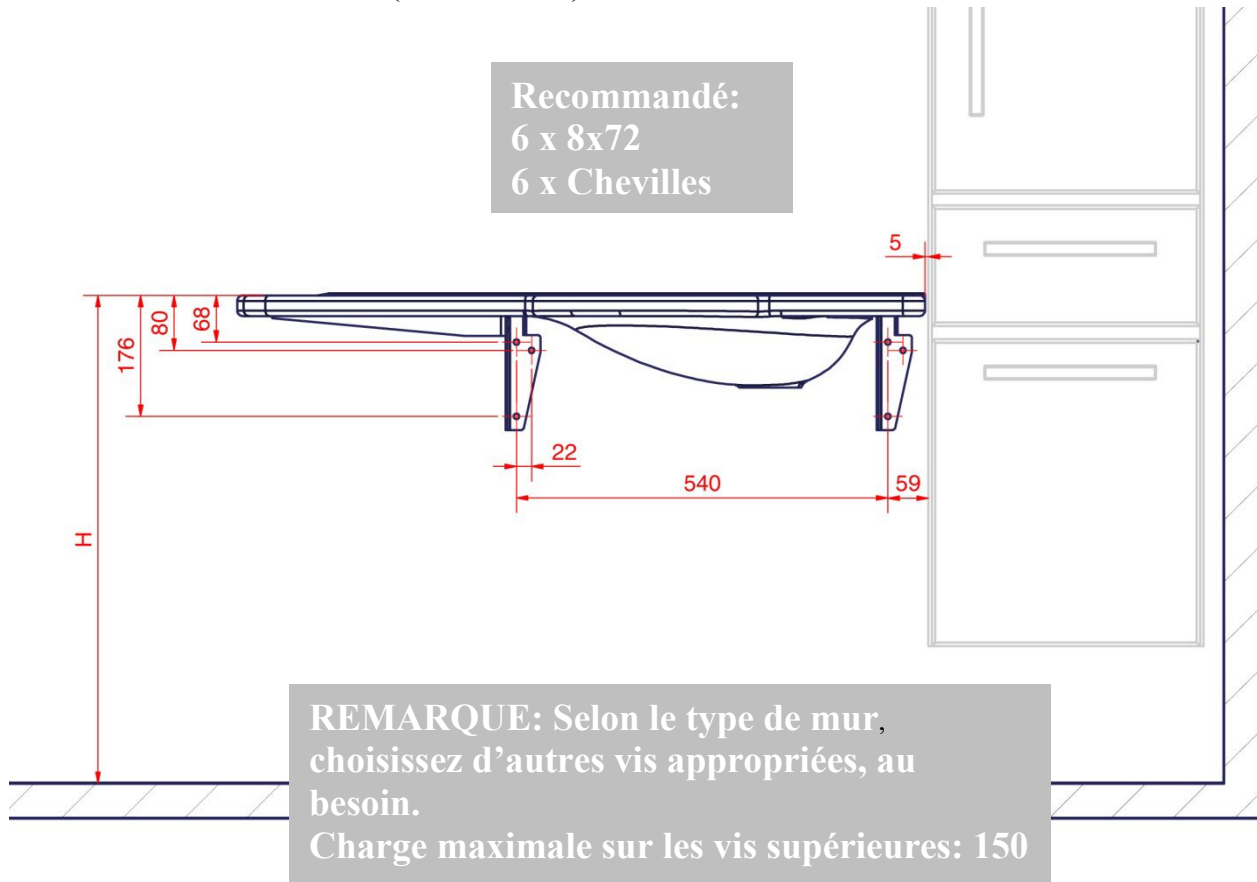


4.4.2 Support lavabo avec cadre de base (40-40 1 2/13)

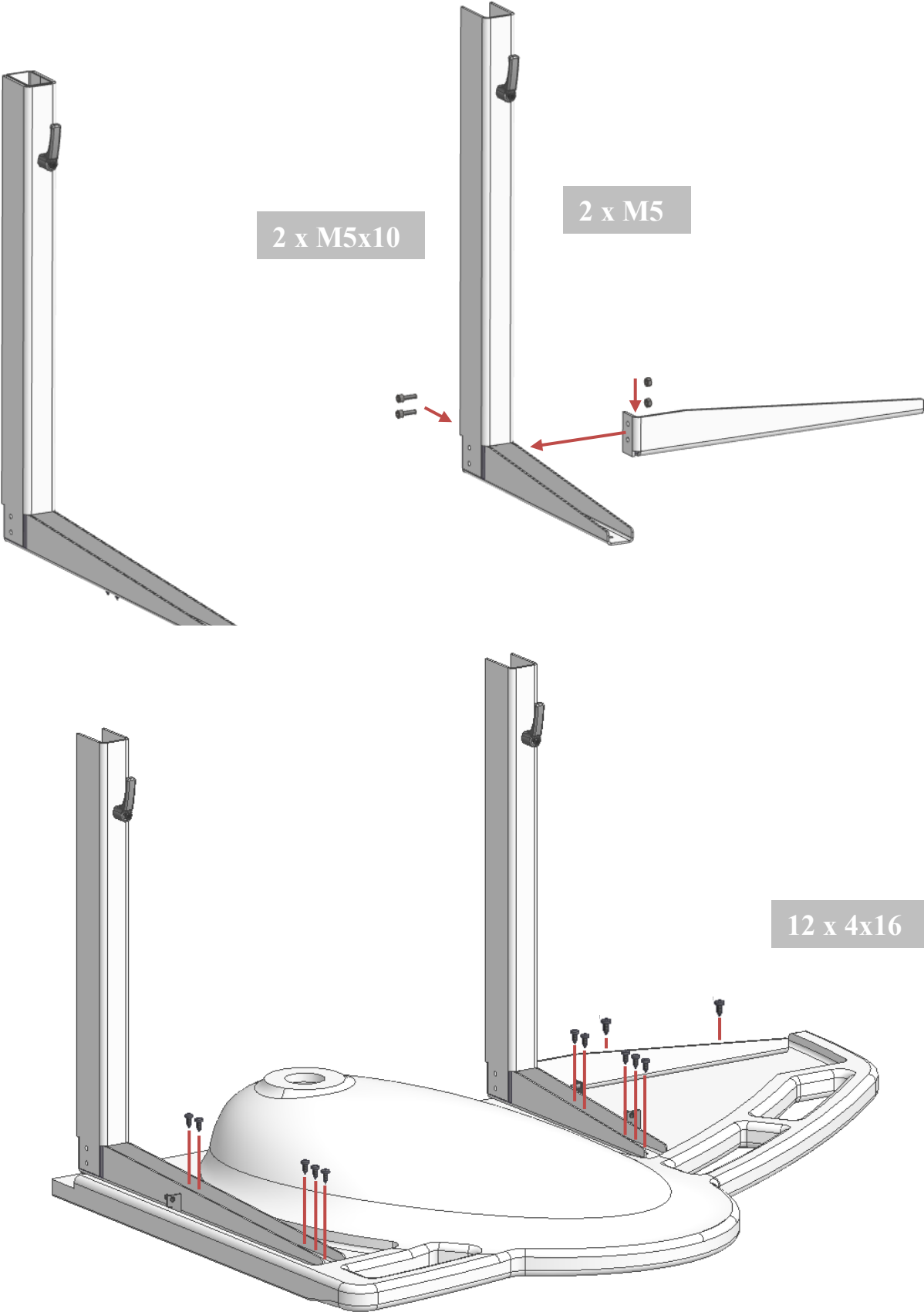

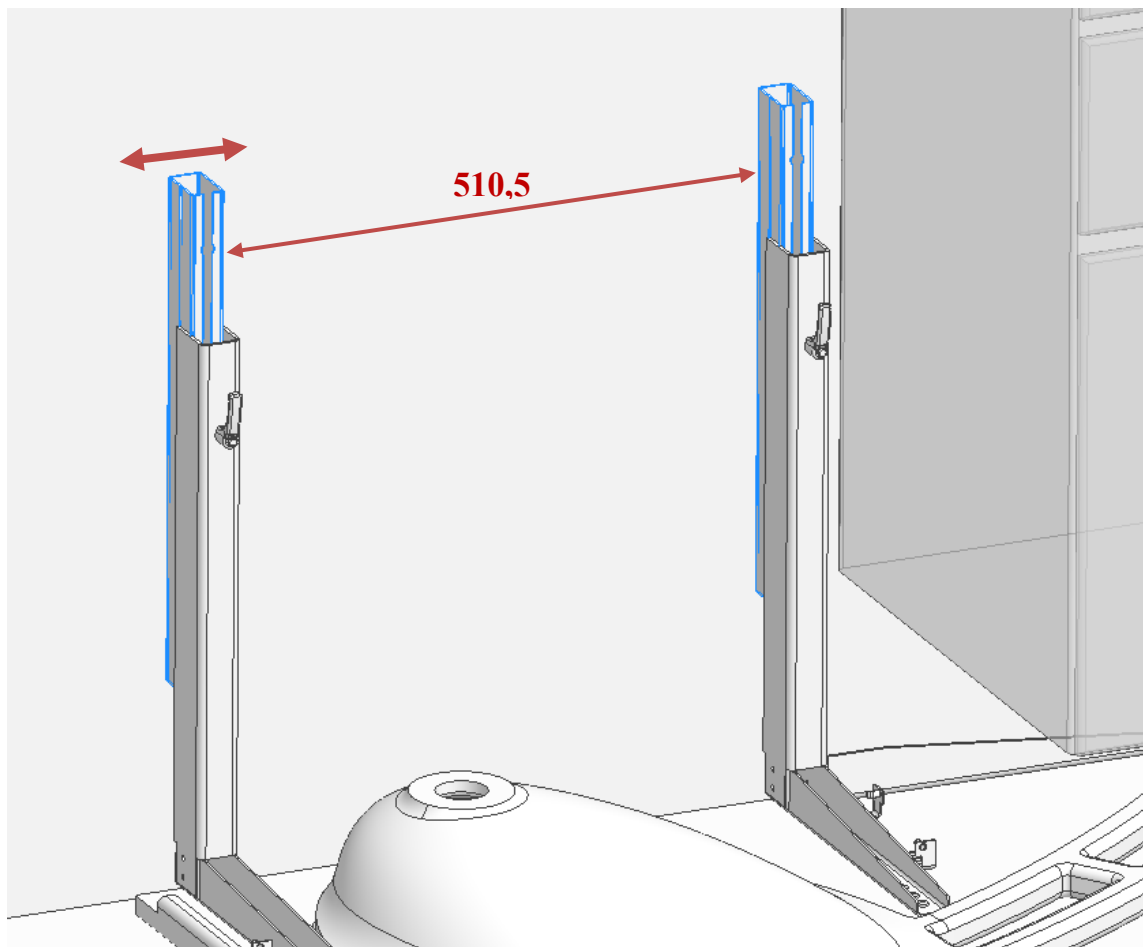
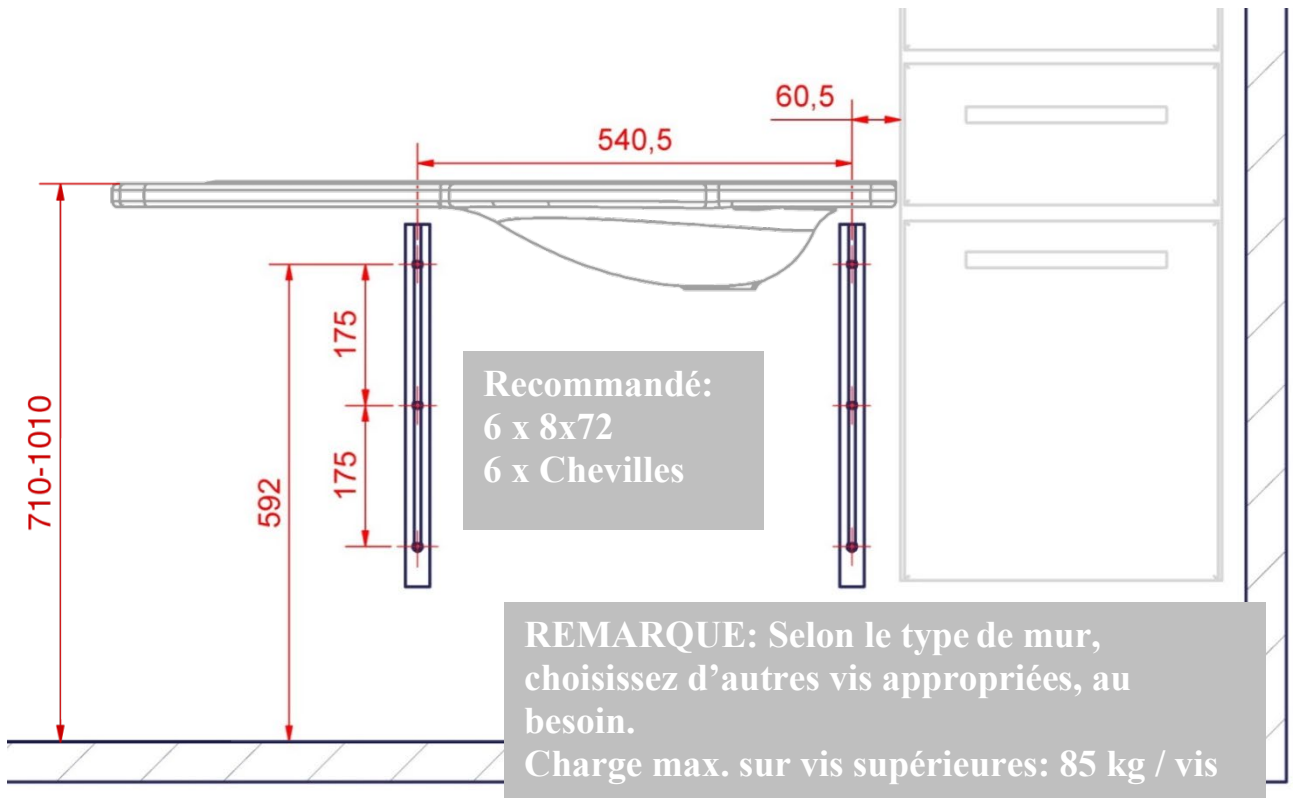


Réglage fin de l'ajustement mural – utilisez les pieds du lavabo

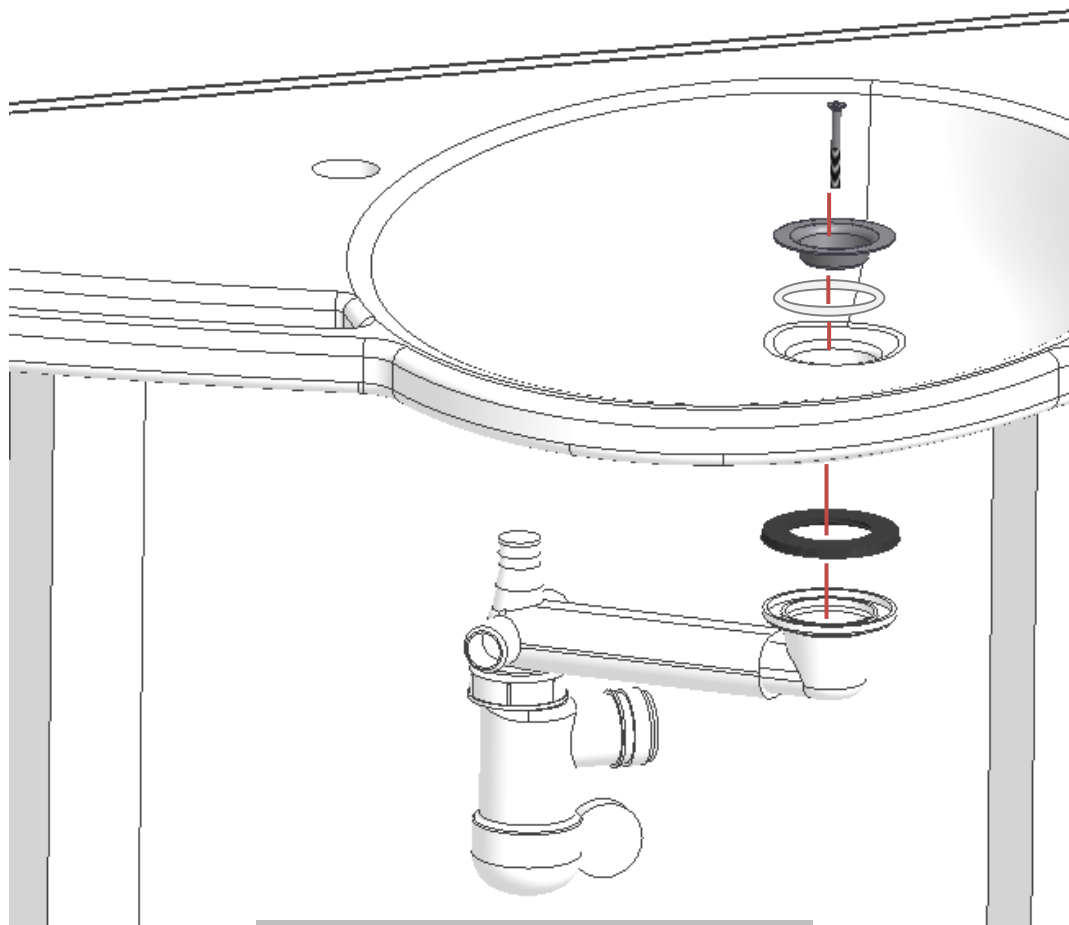
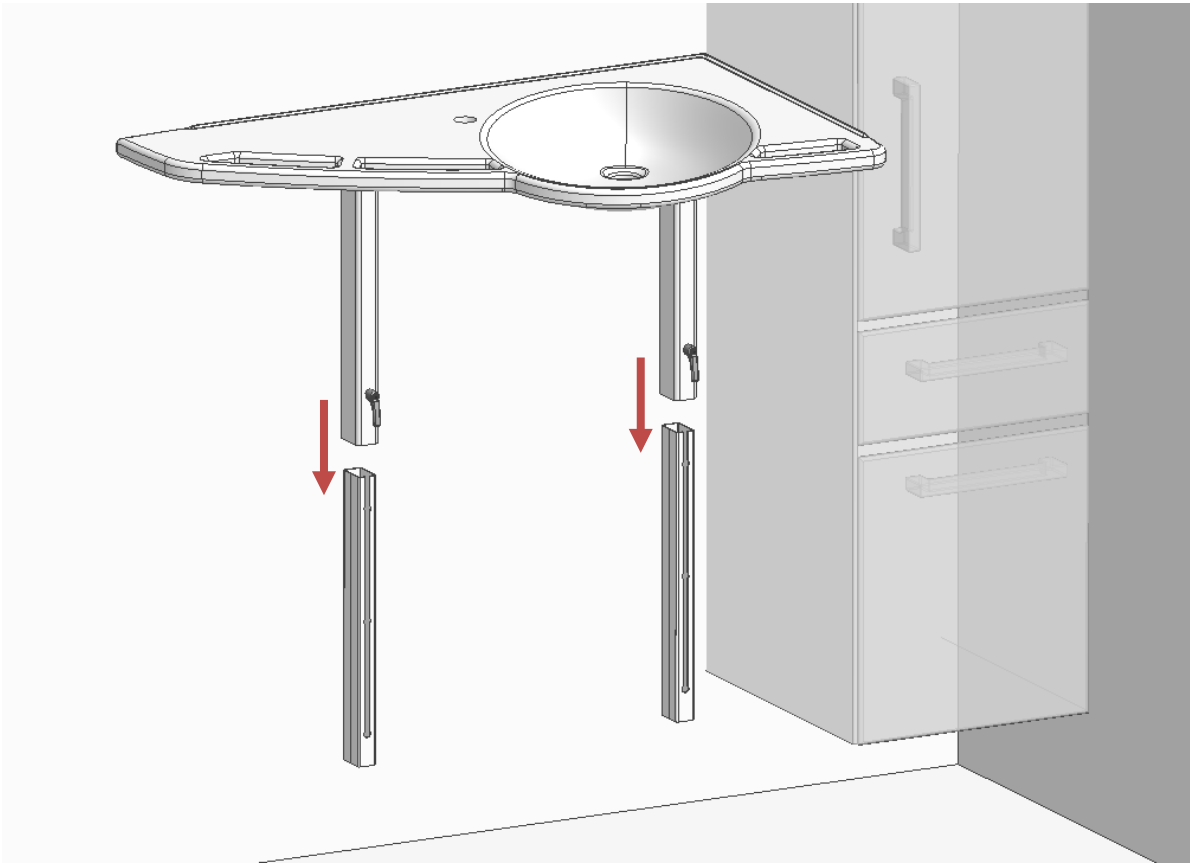




Accessoires de kit de plomberie



Accessoires de robinet mélangeur

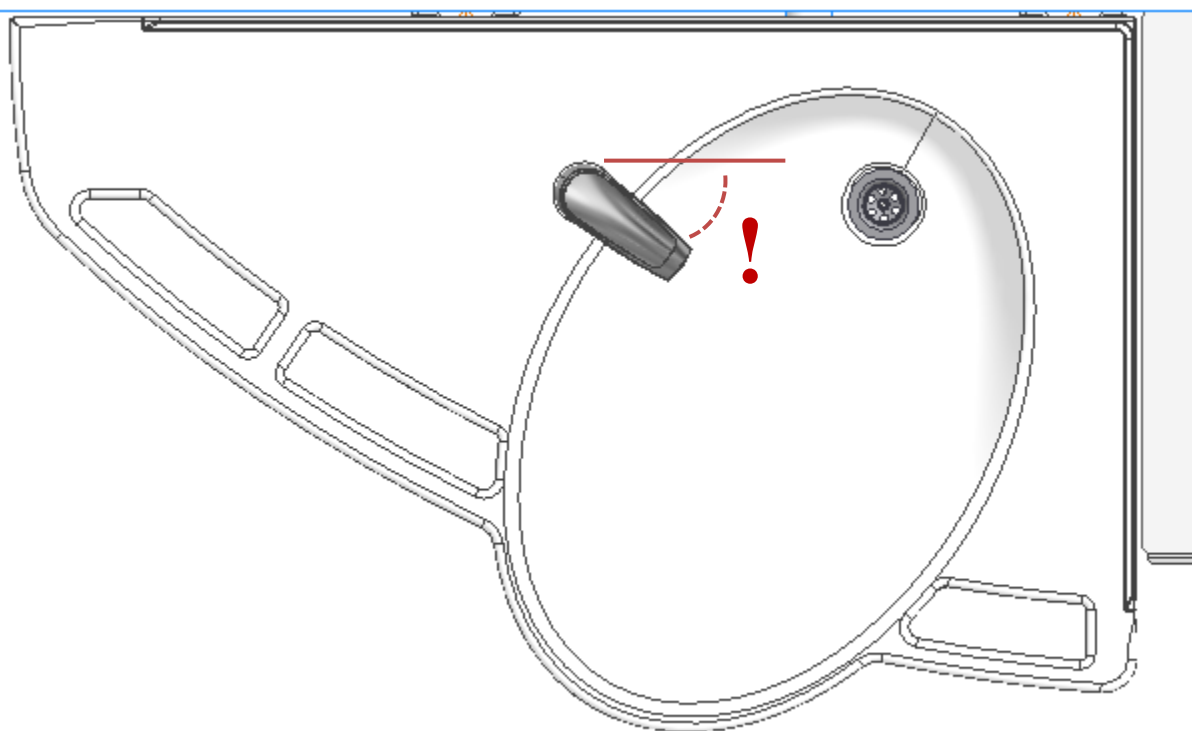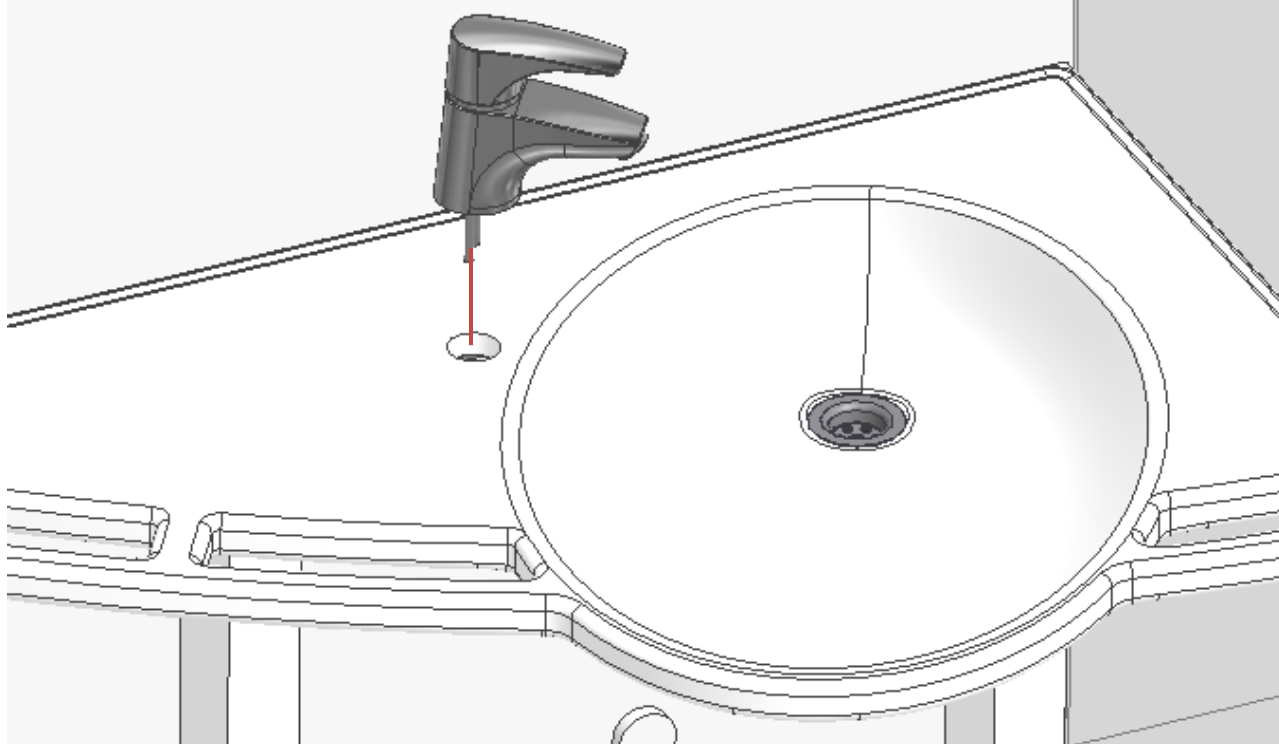



4.4.3 Montage de couvercles pour 40-440 1 2/13 (accessoires)

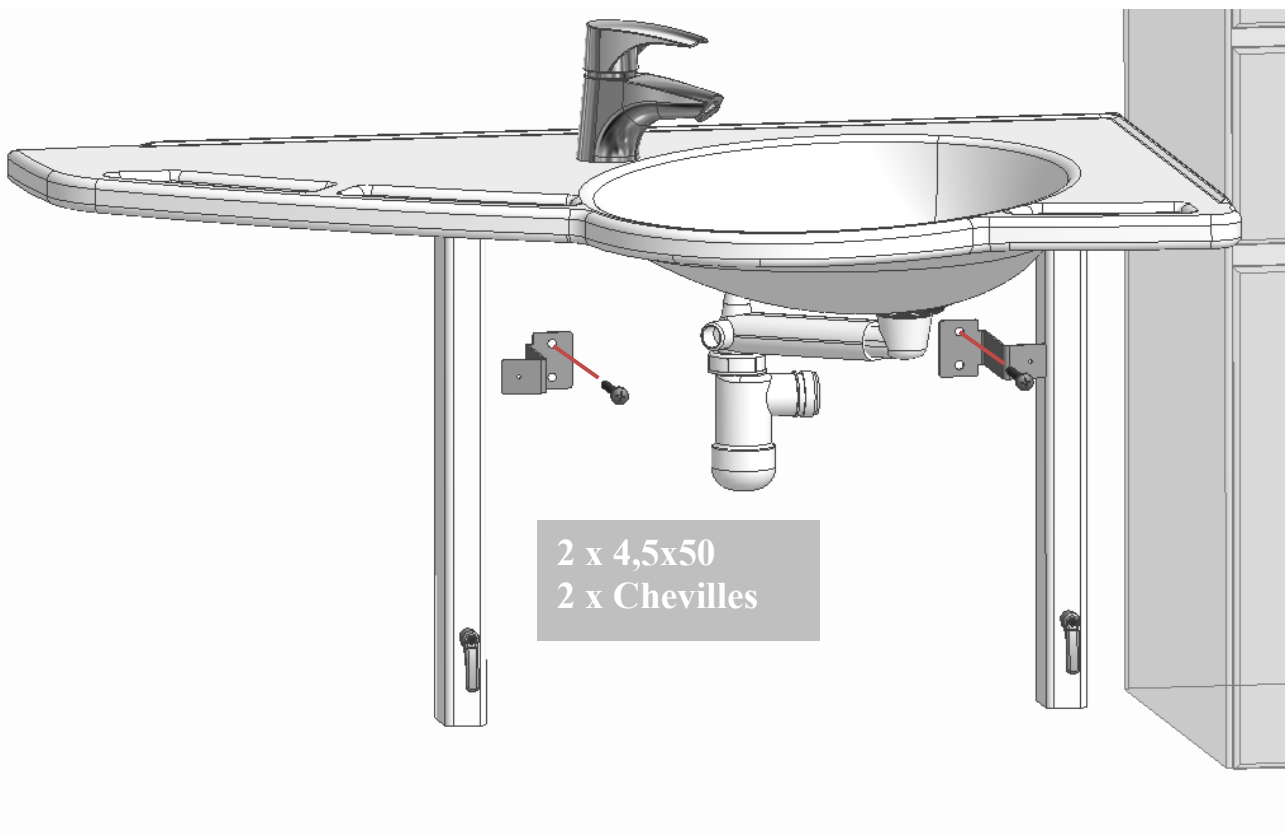
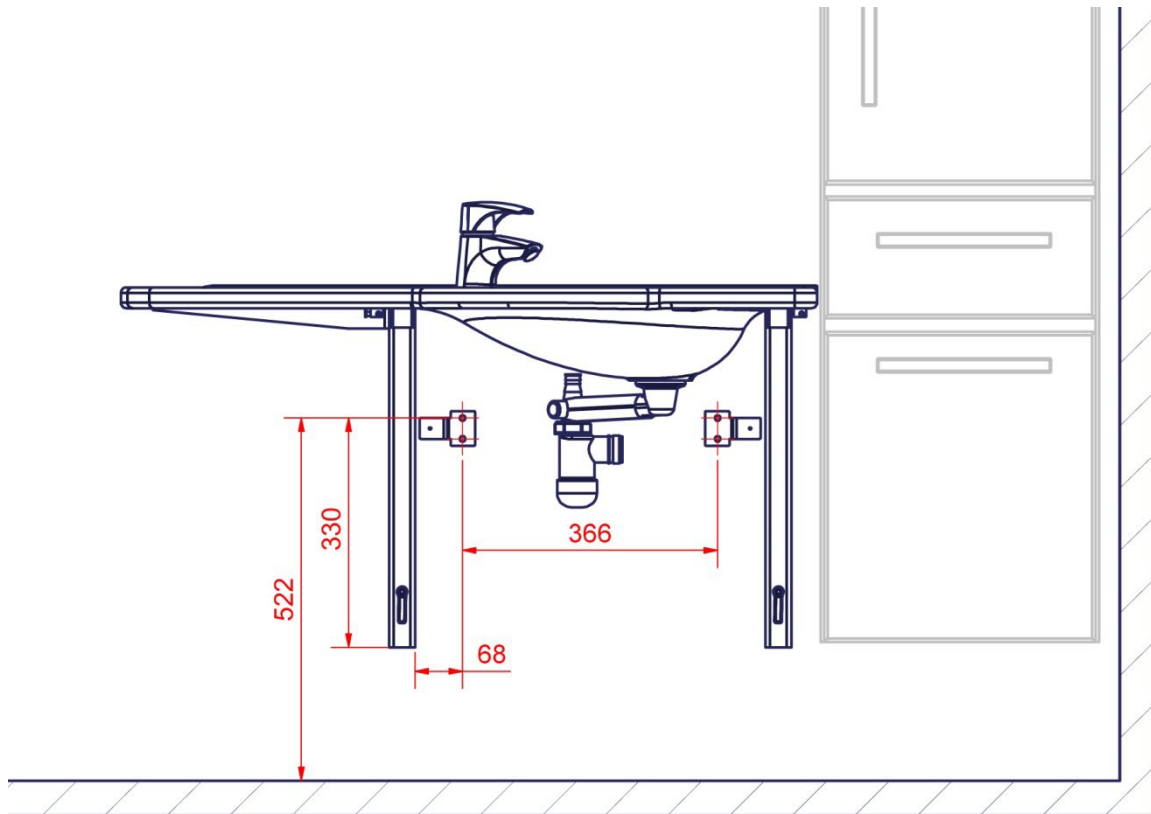


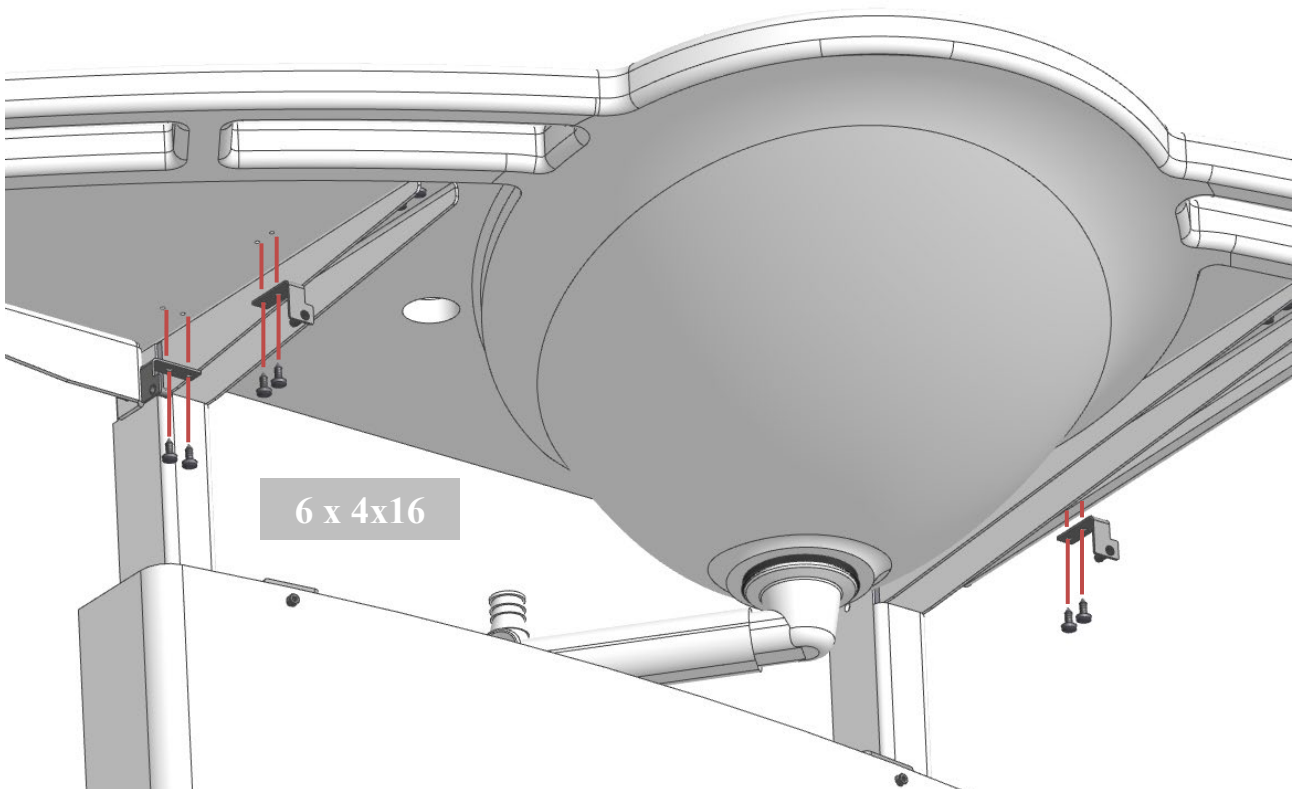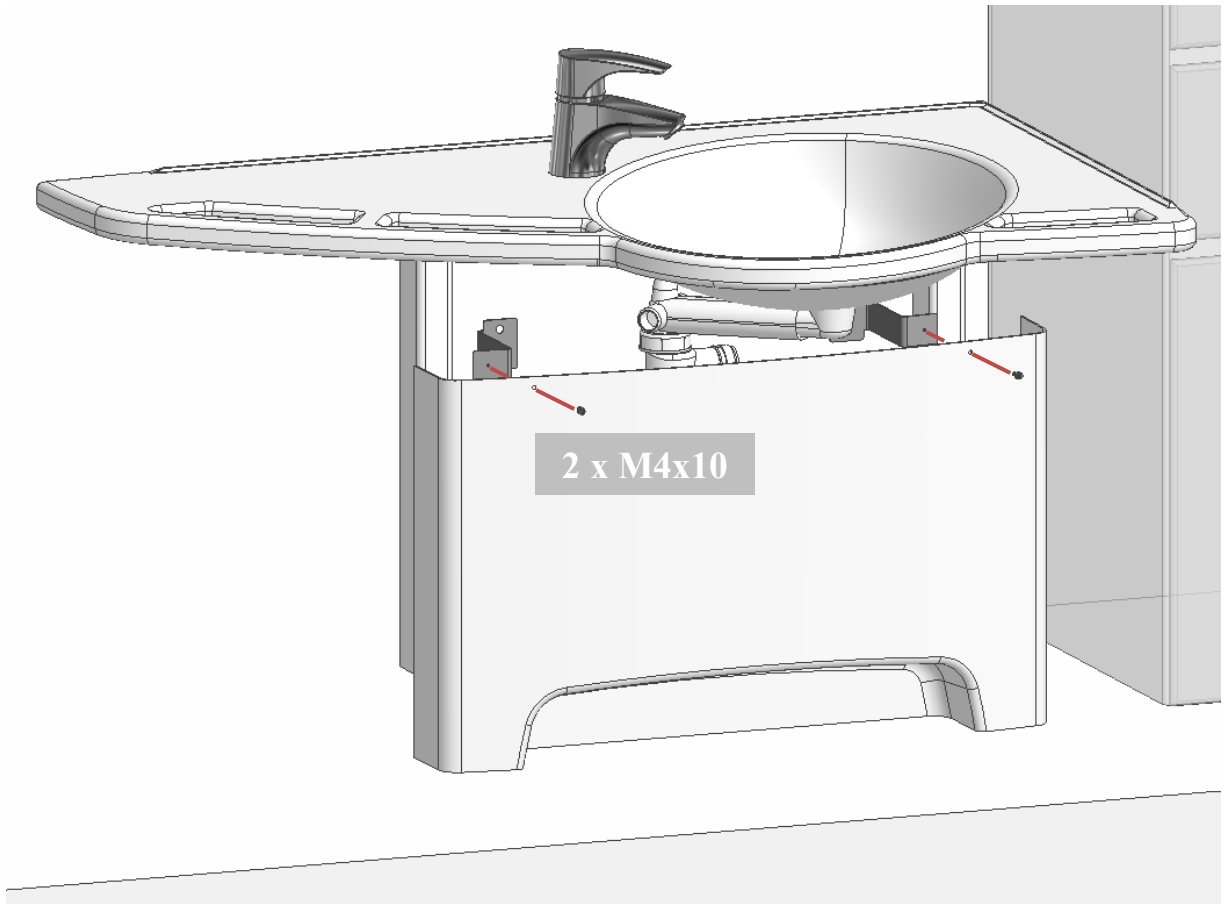


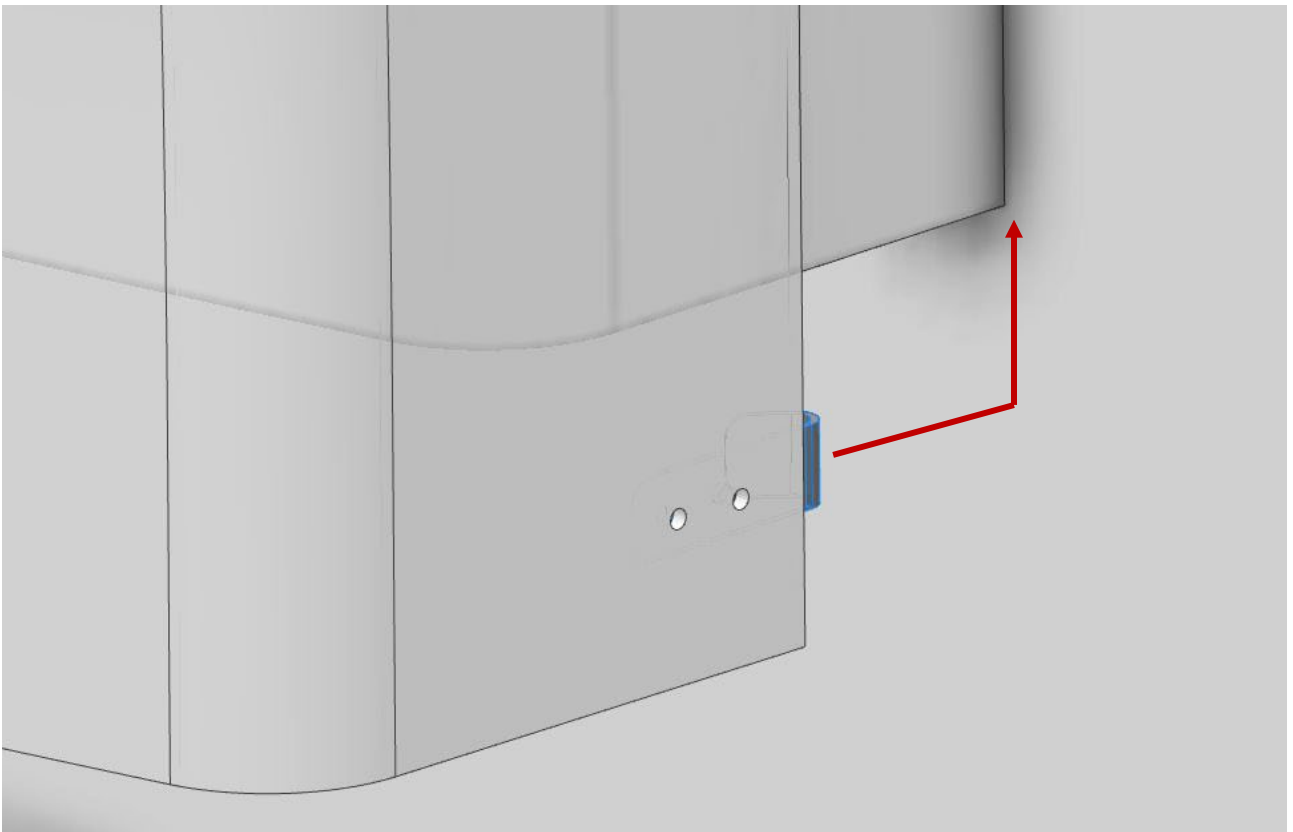
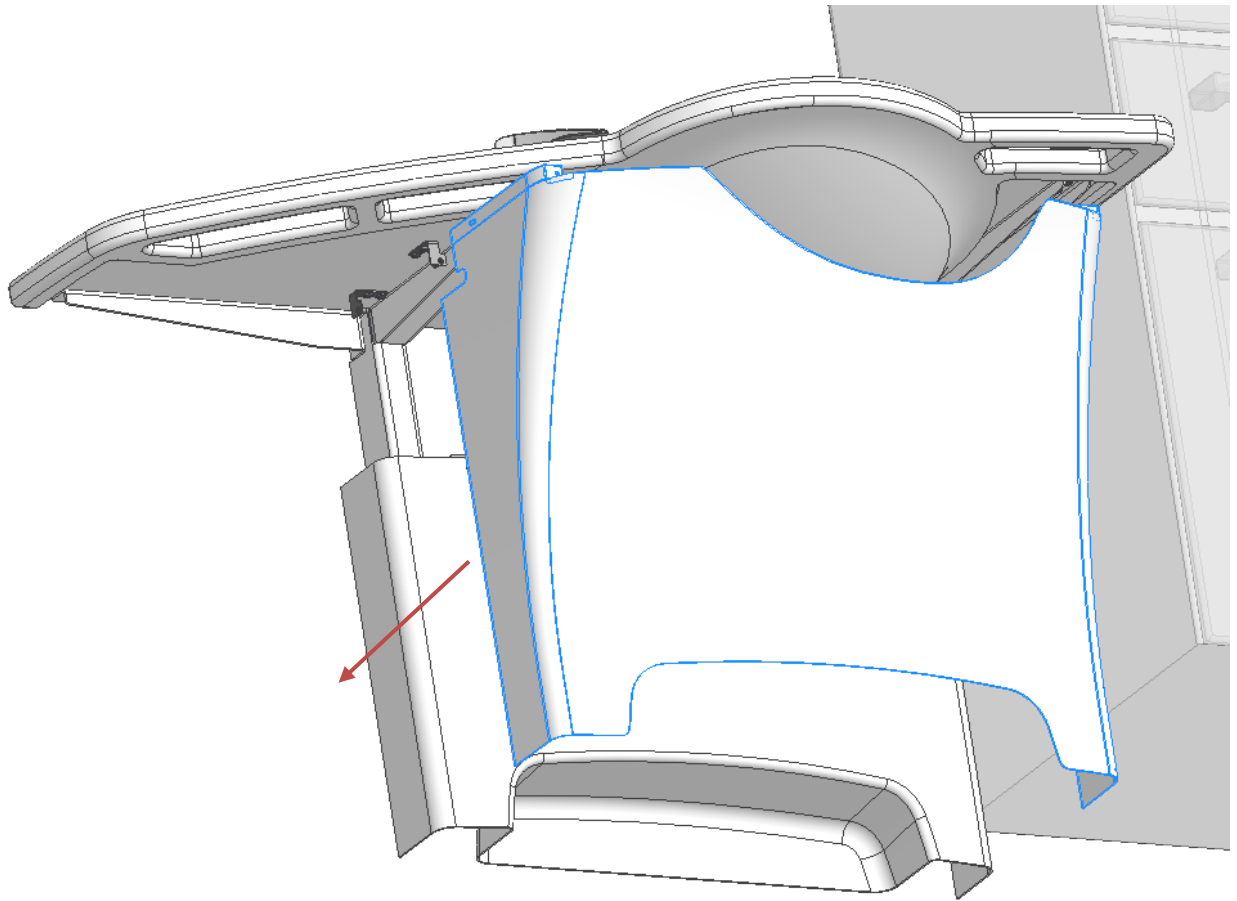


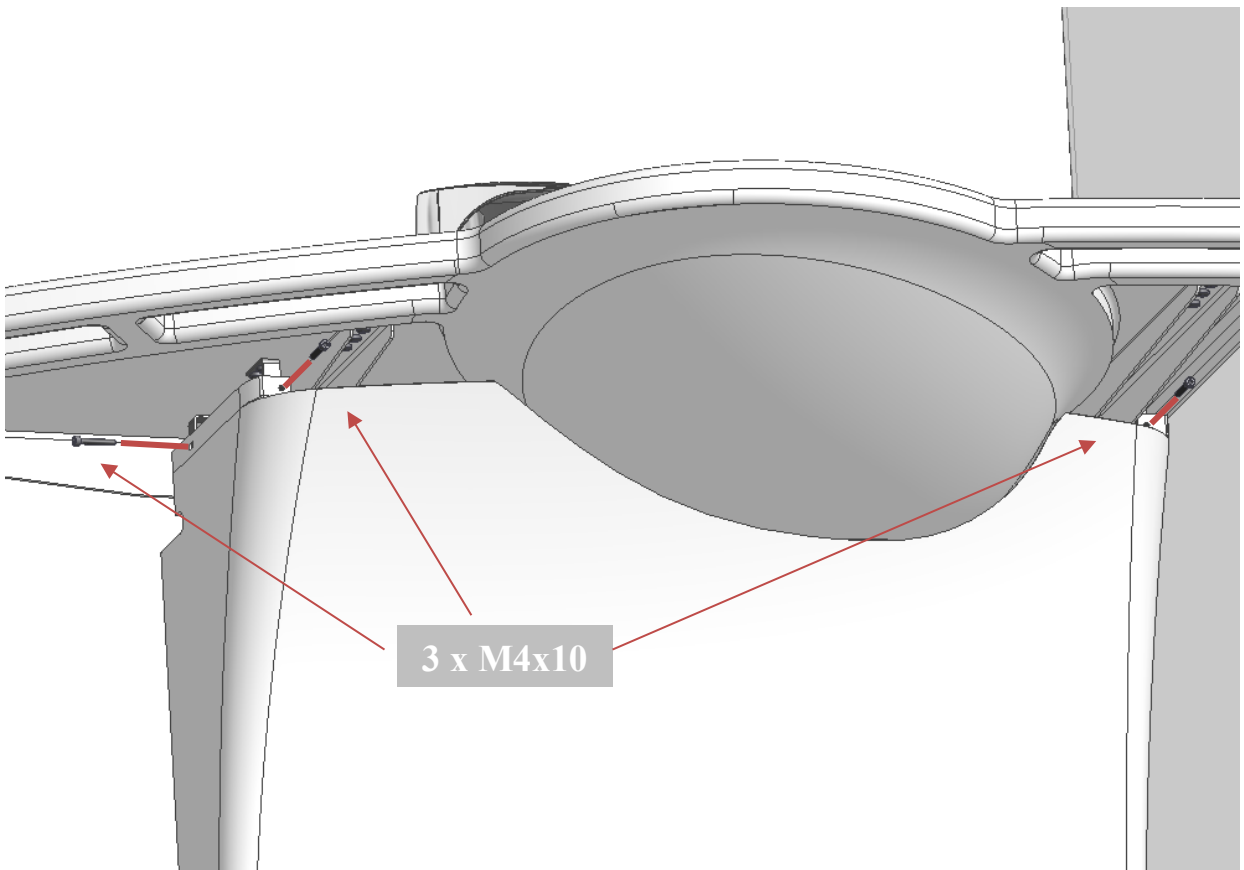

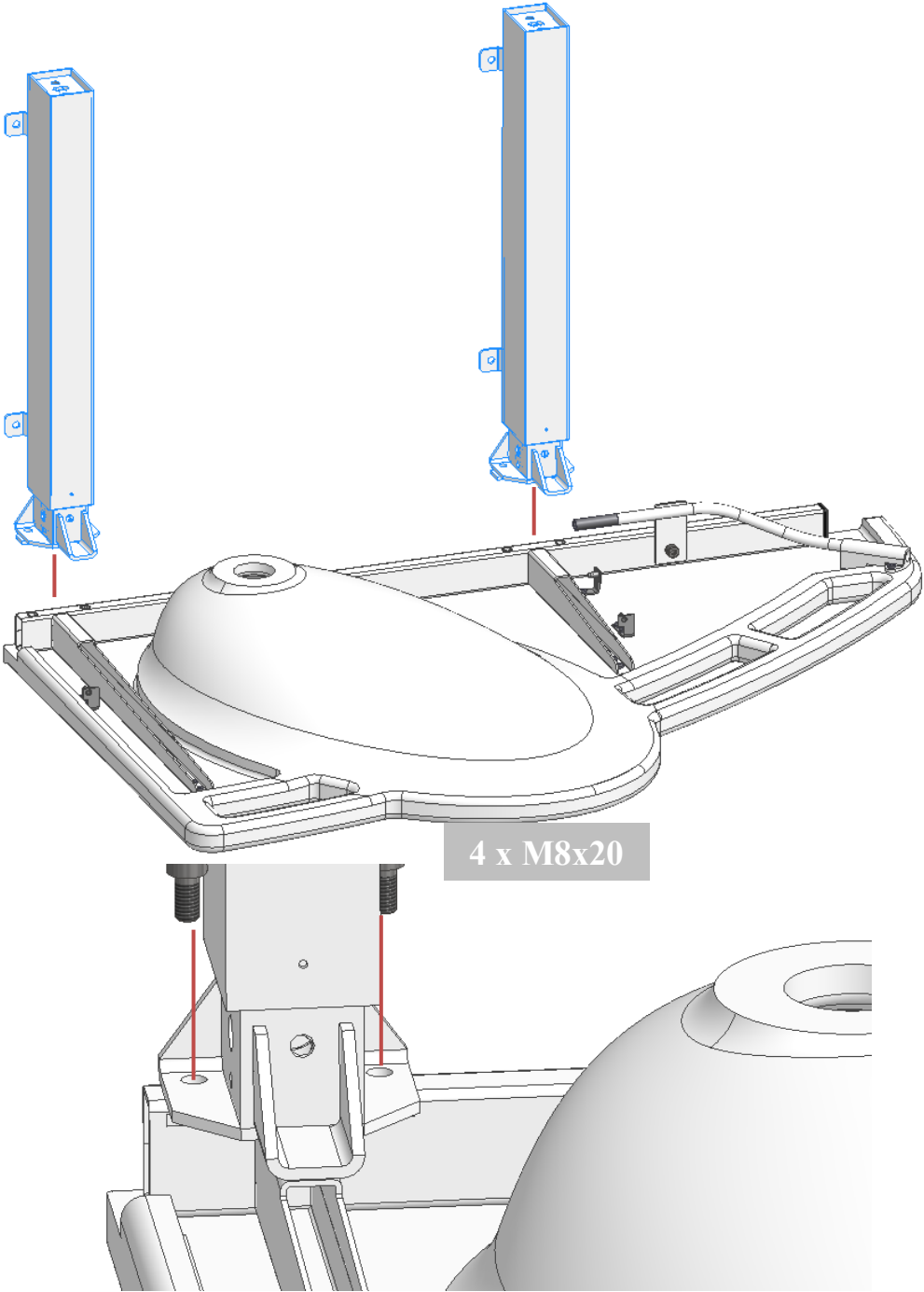


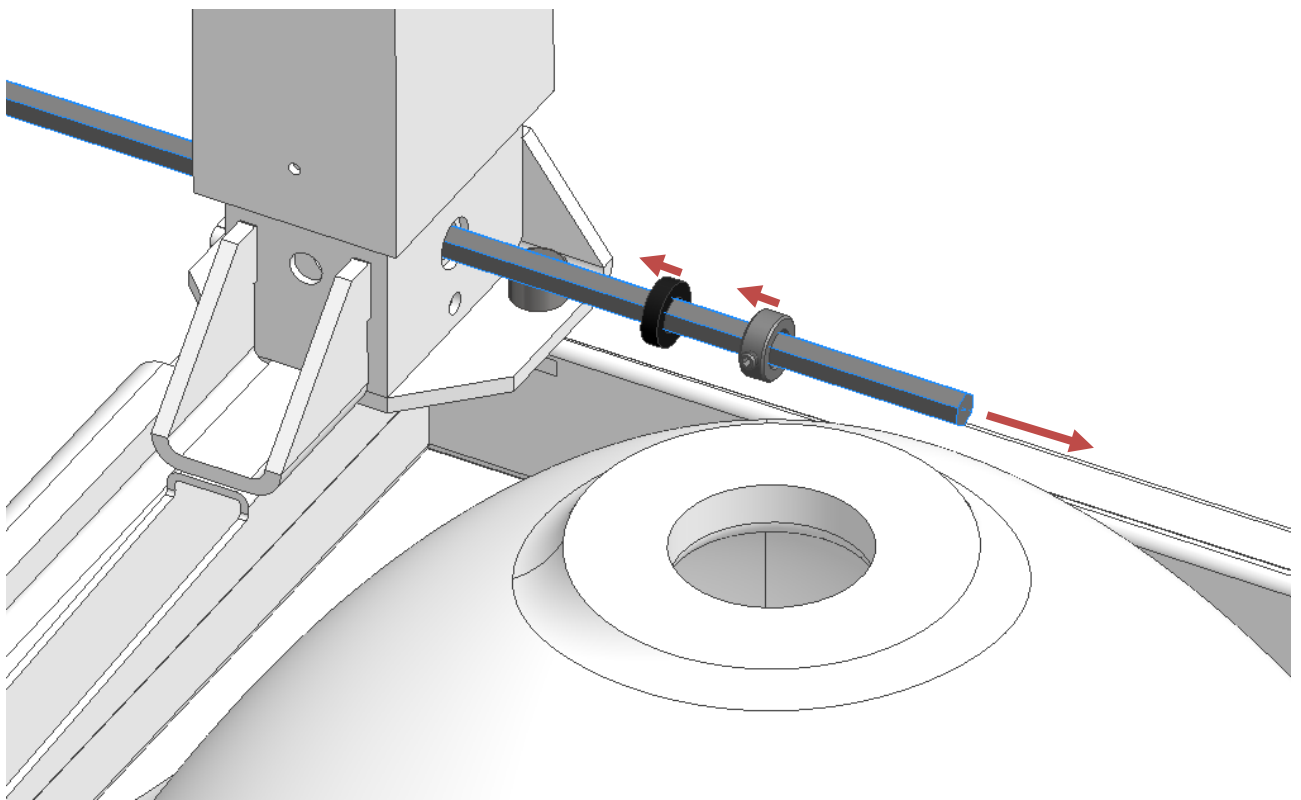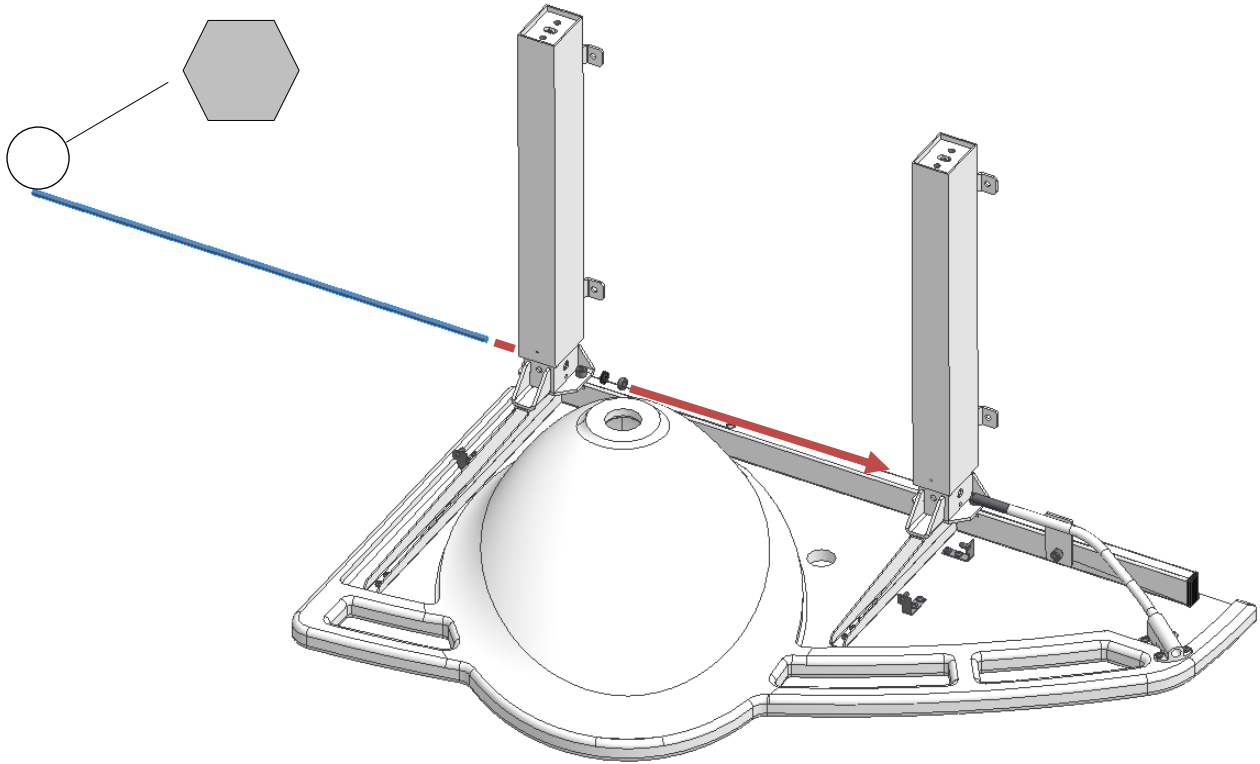

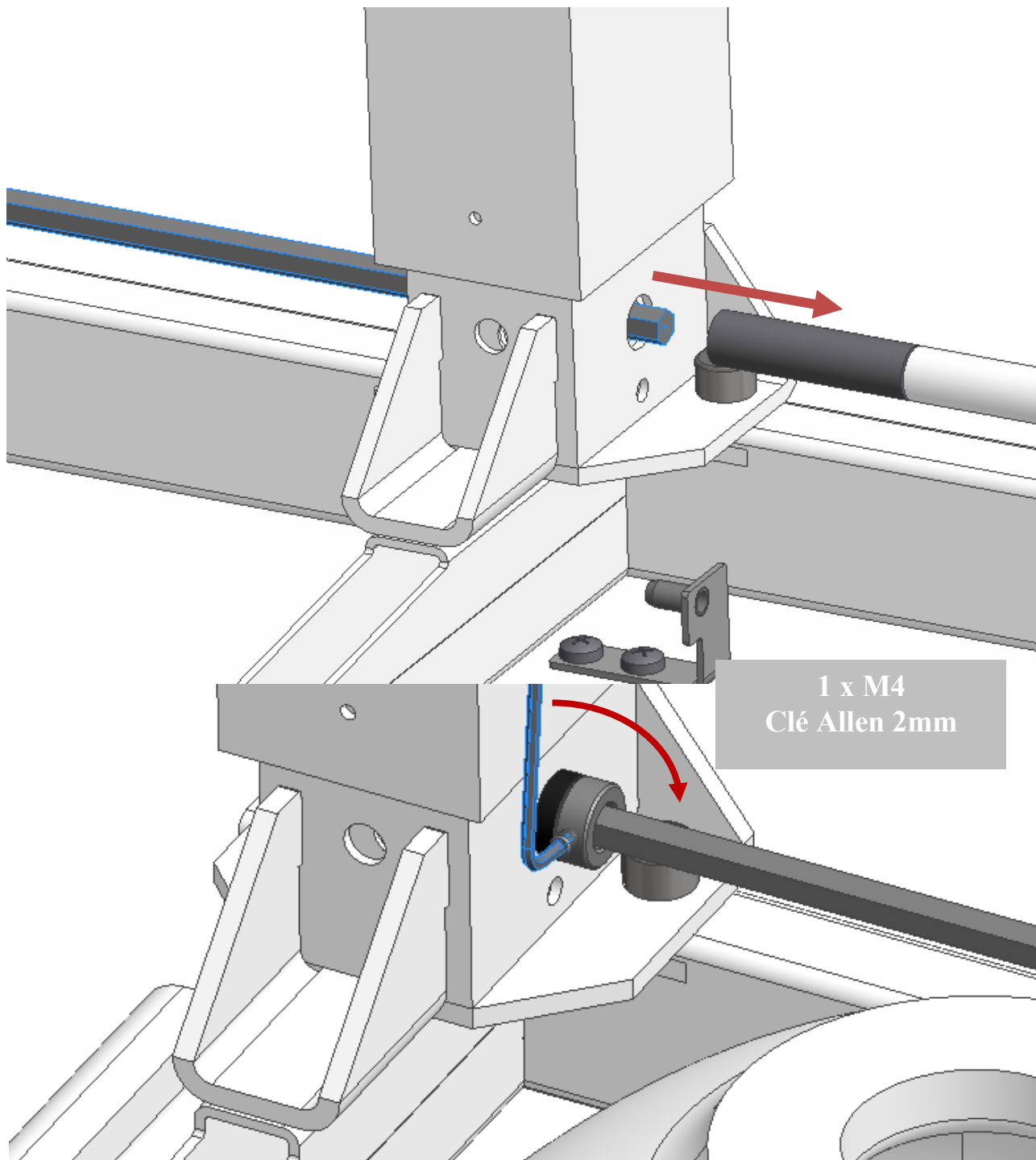


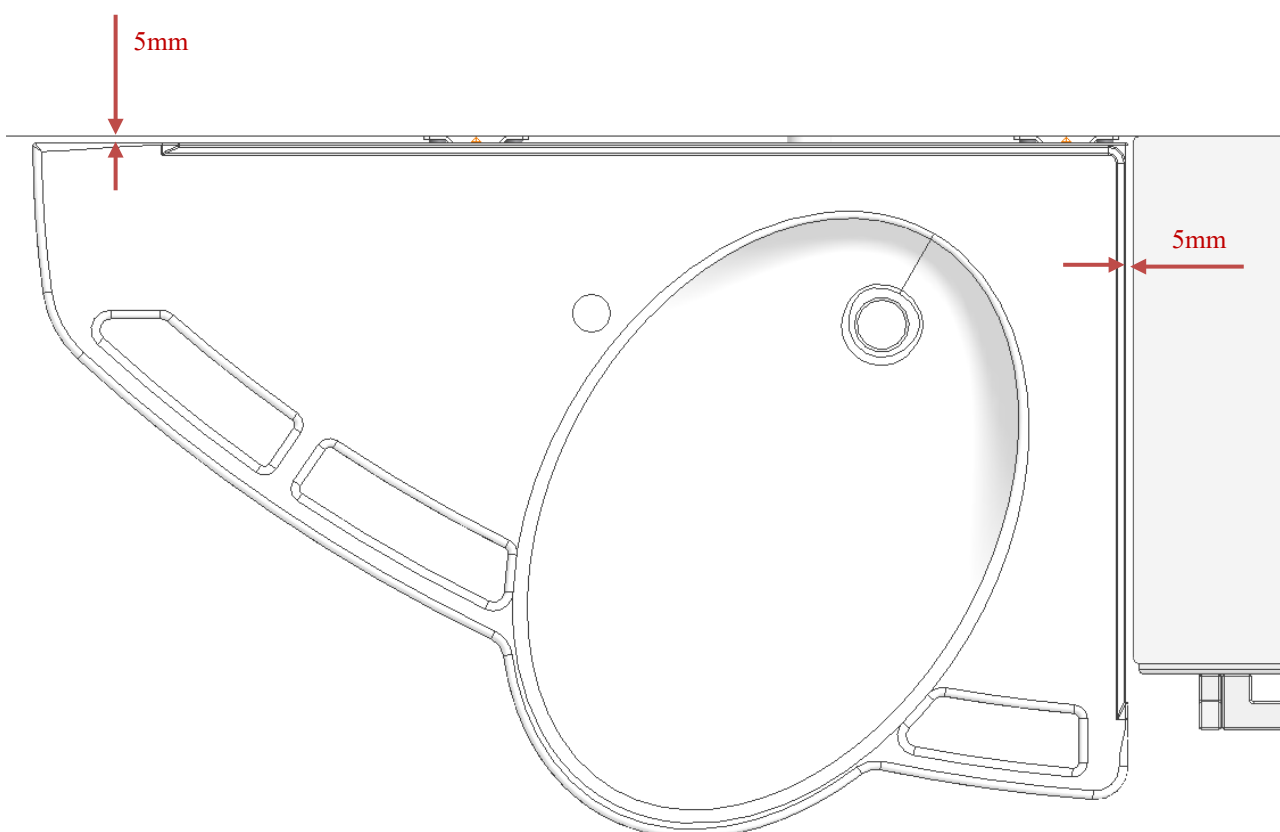
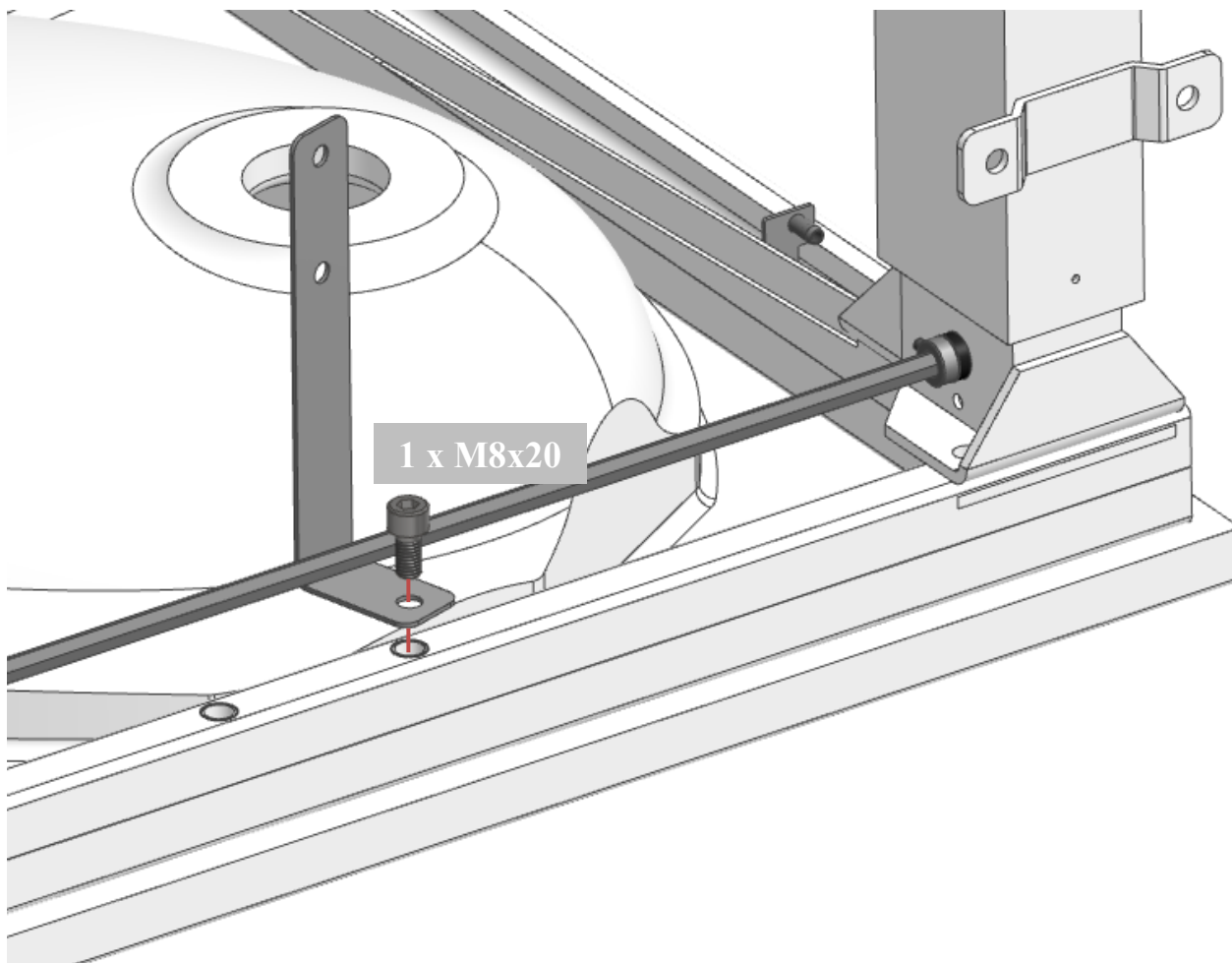


Recommandé:
6 x 8x72
6 x Chevilles


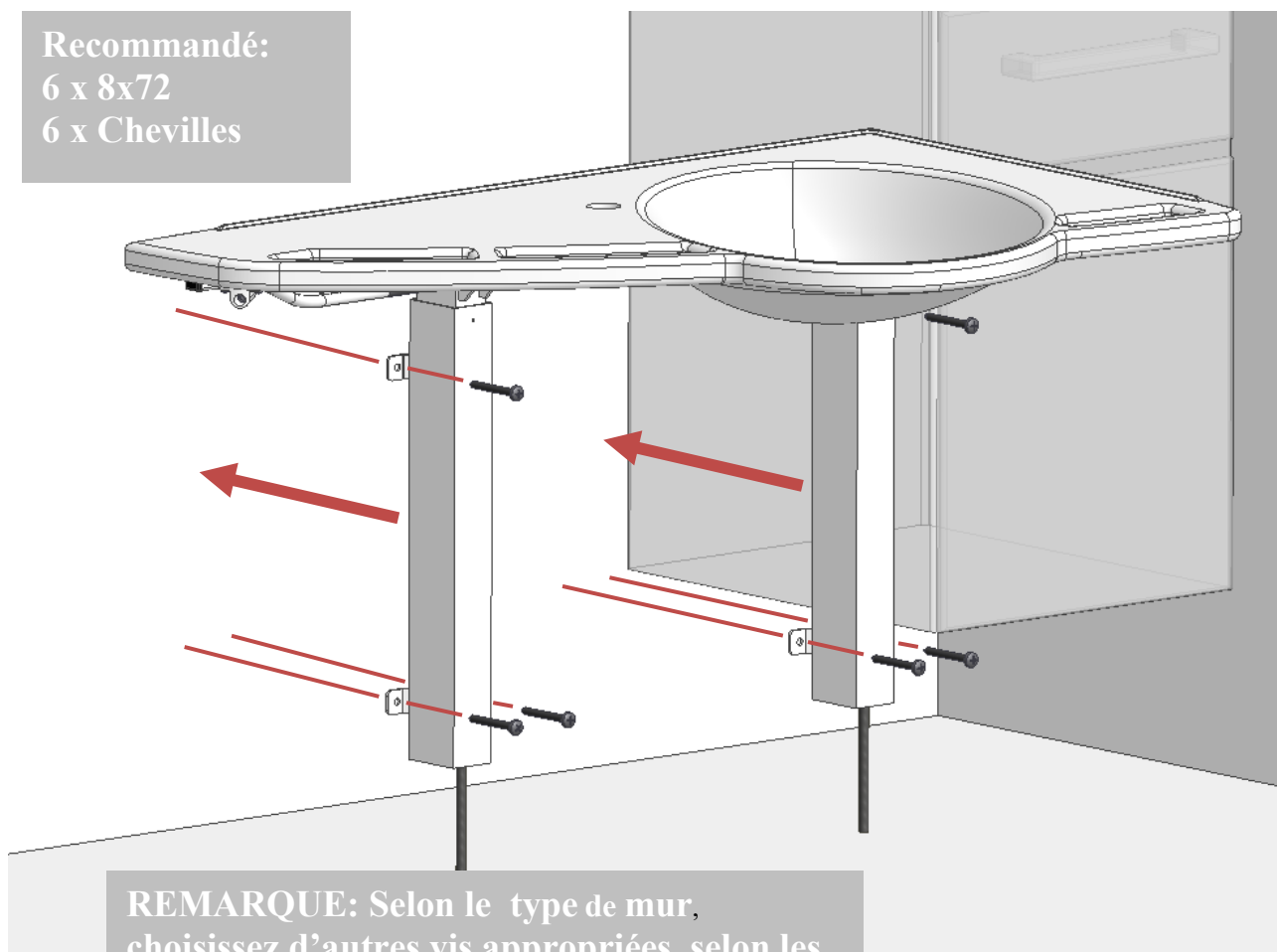



REMARQUE: Selon le type de mur,
choisissez d'autres vis appropriées, selon les
besoins.
Charge max. sur vis supérieures: 71 kg / vis

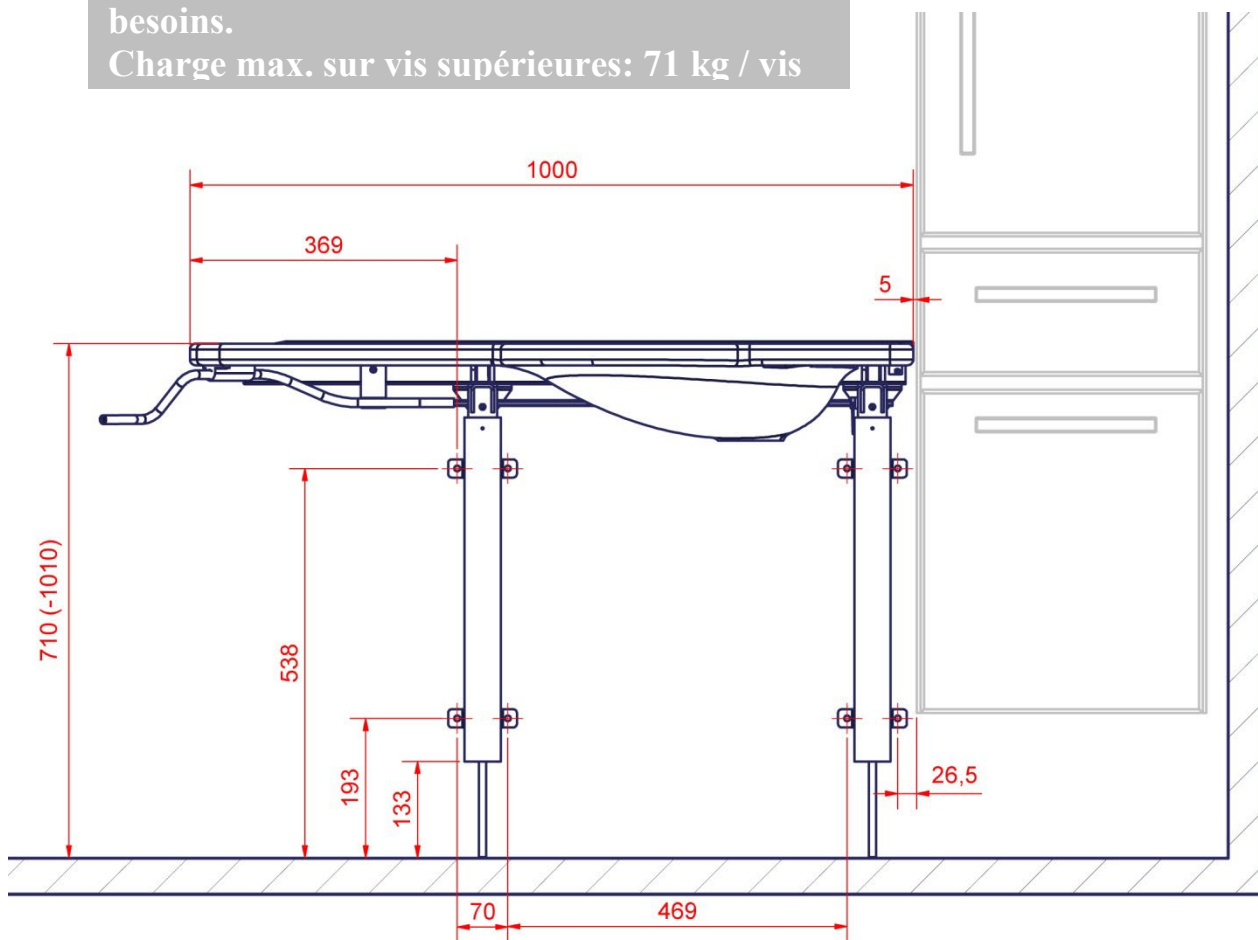

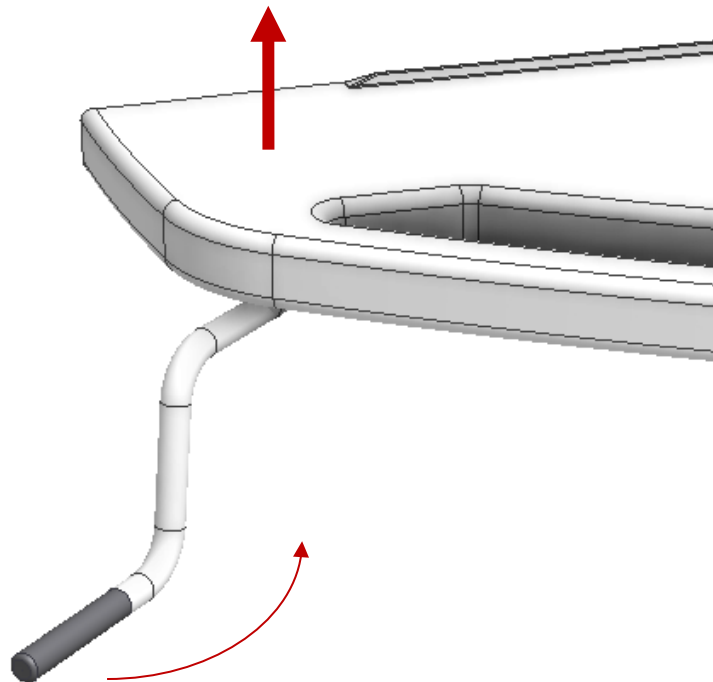
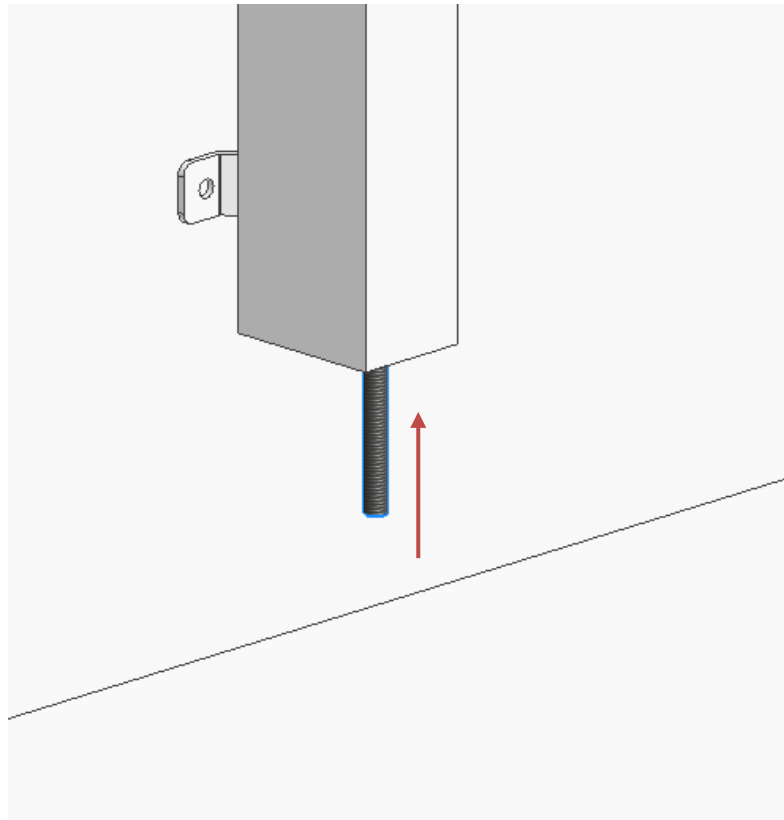




Conseil : Déplacez le lavabo en position supérieure pour faciliter le montage ultérieur

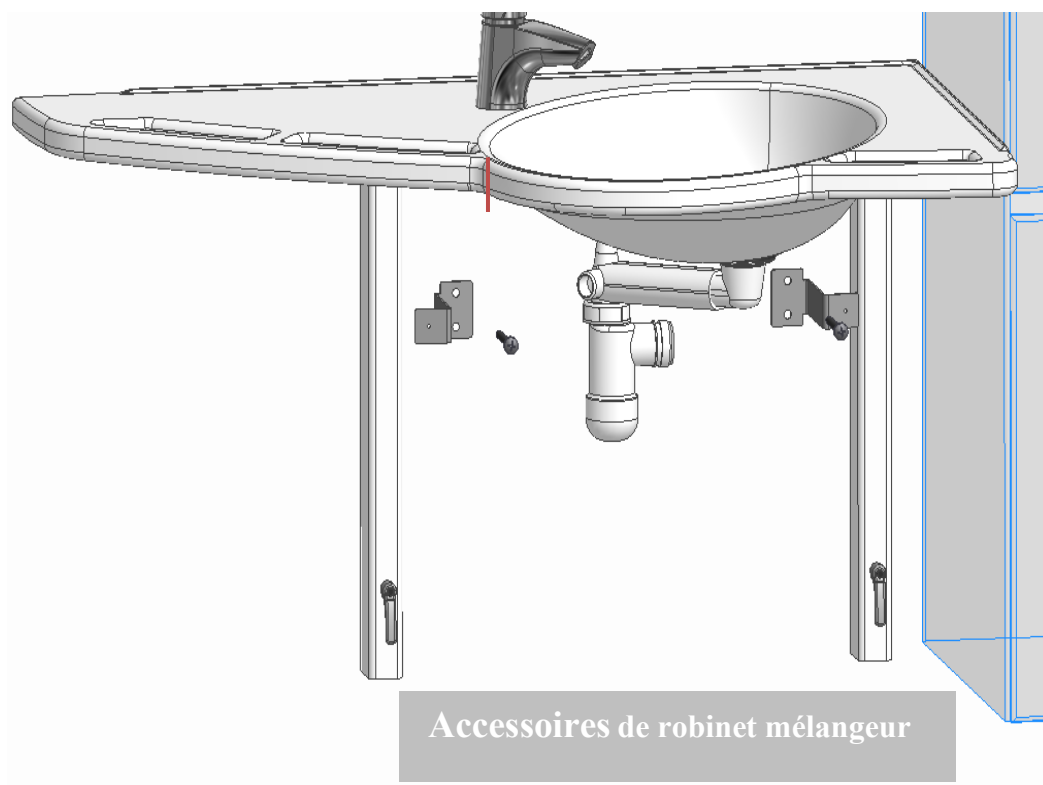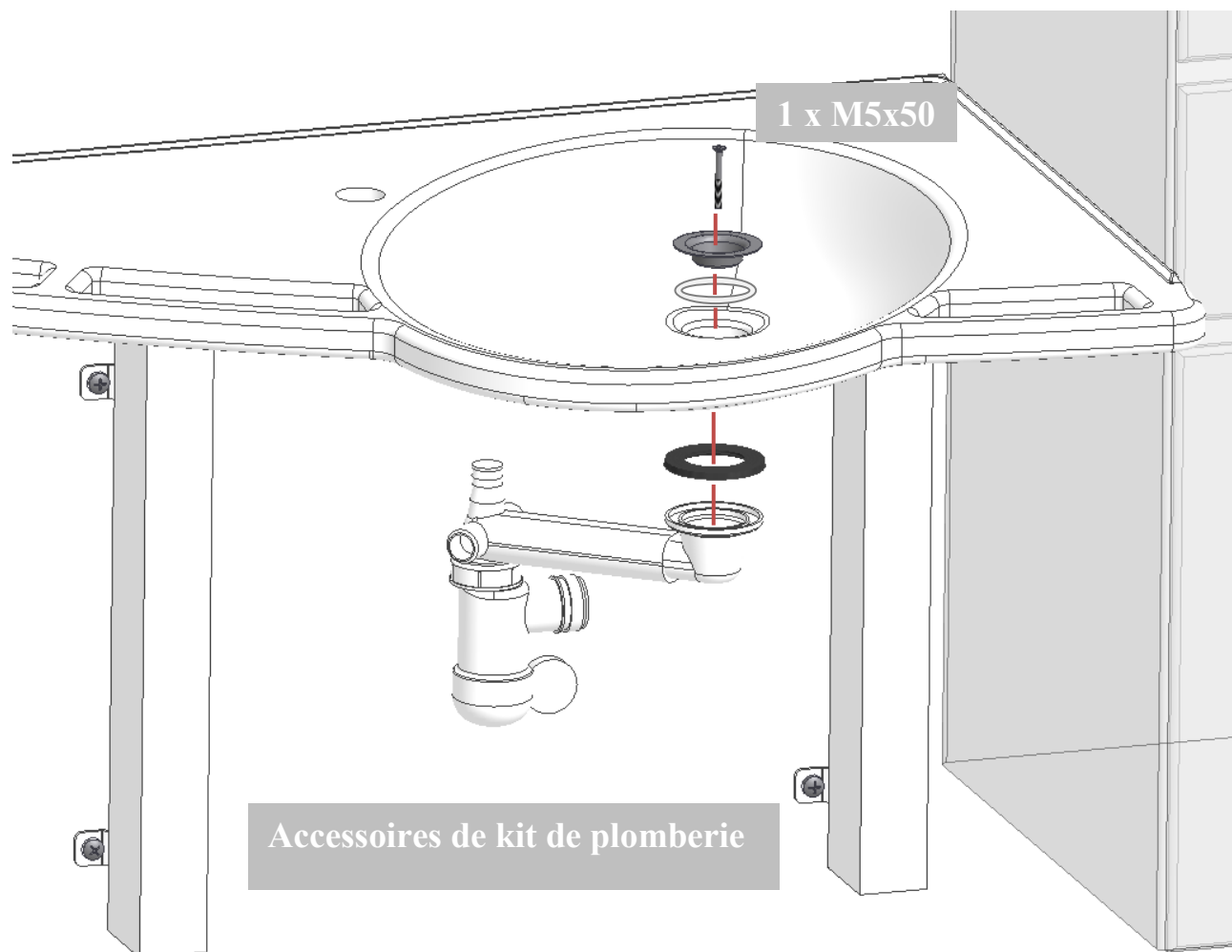



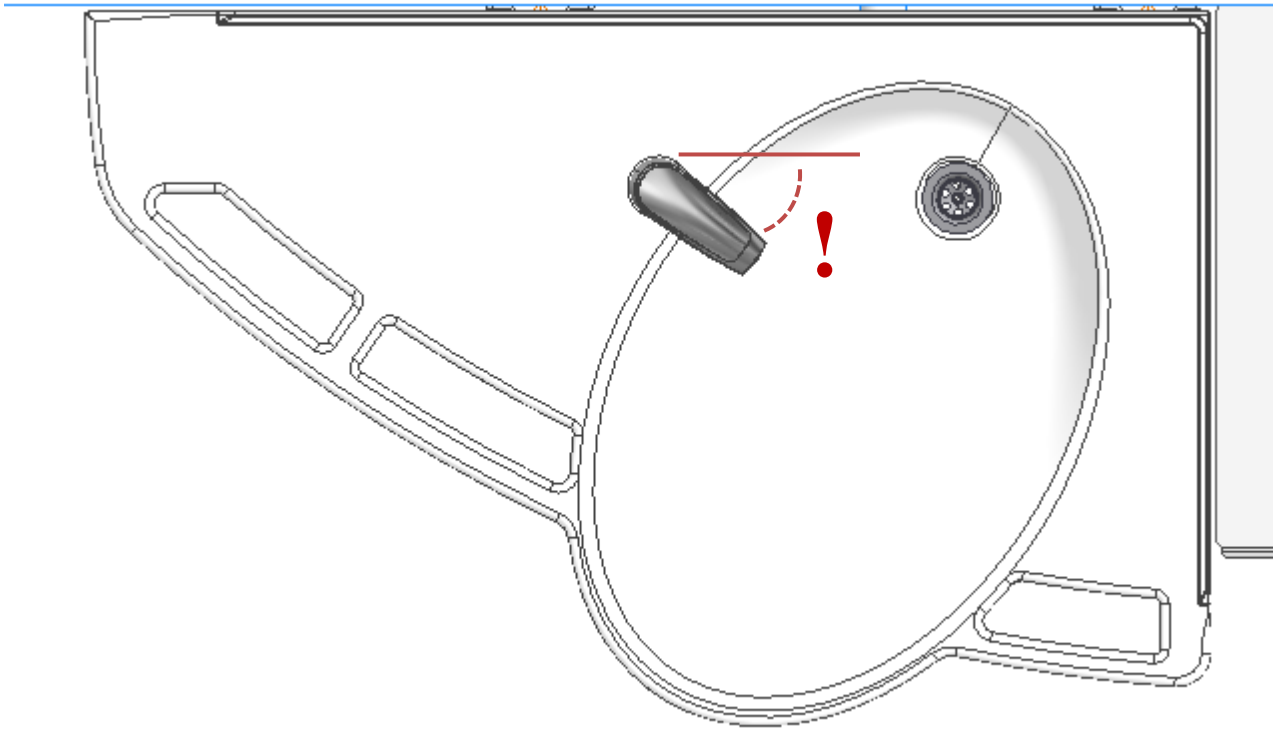


4.4.5 Montage de couvercles pour 40-440 1 4/15

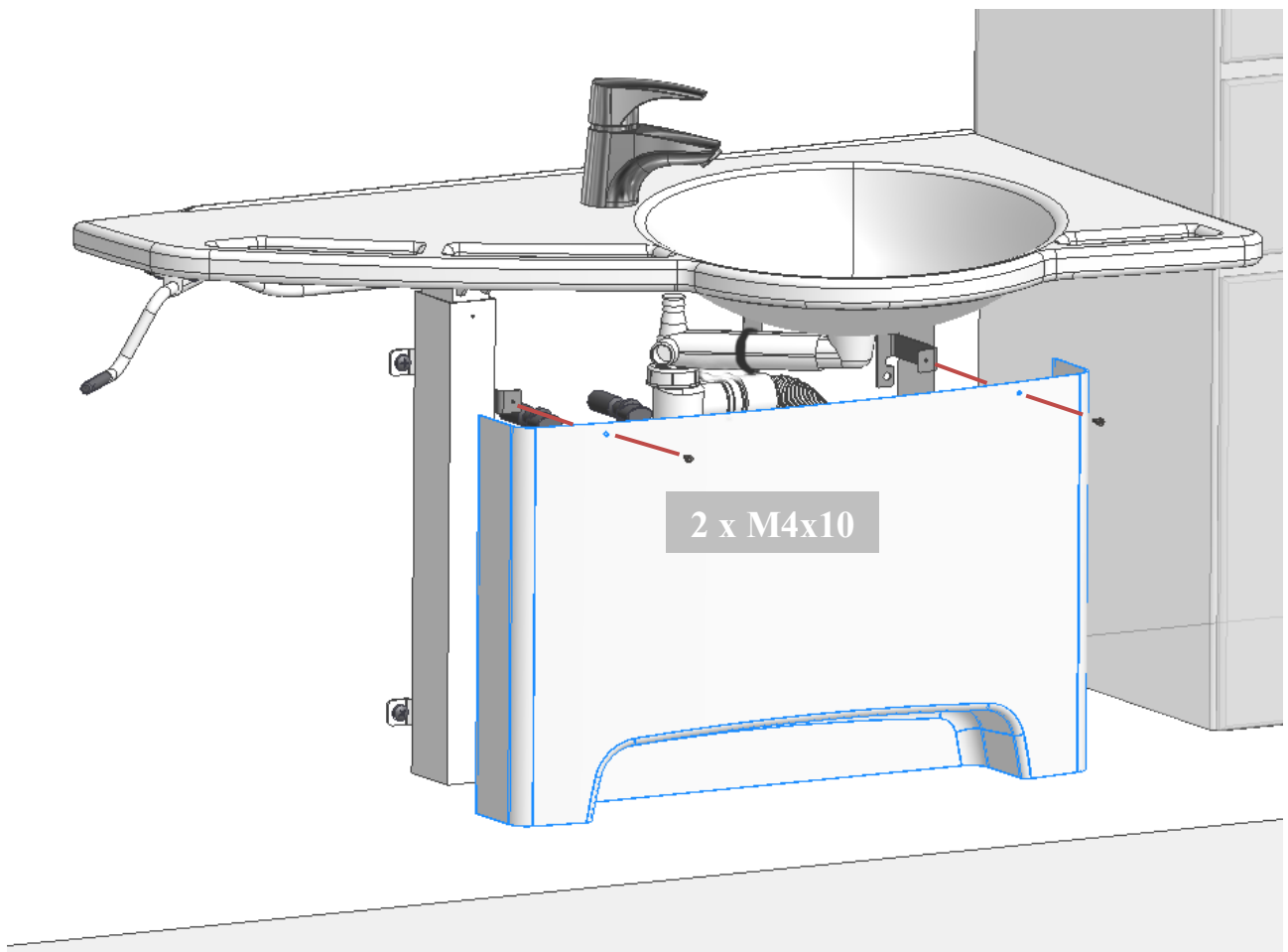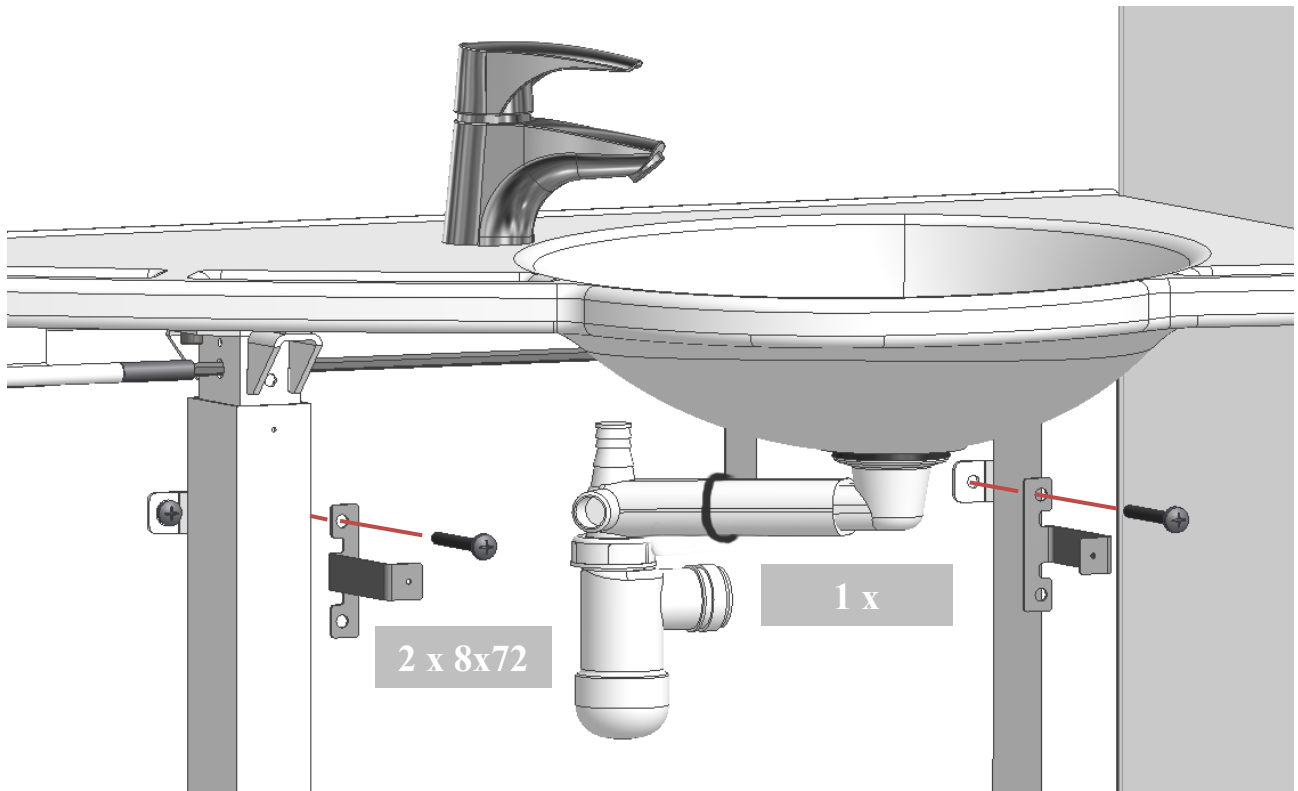

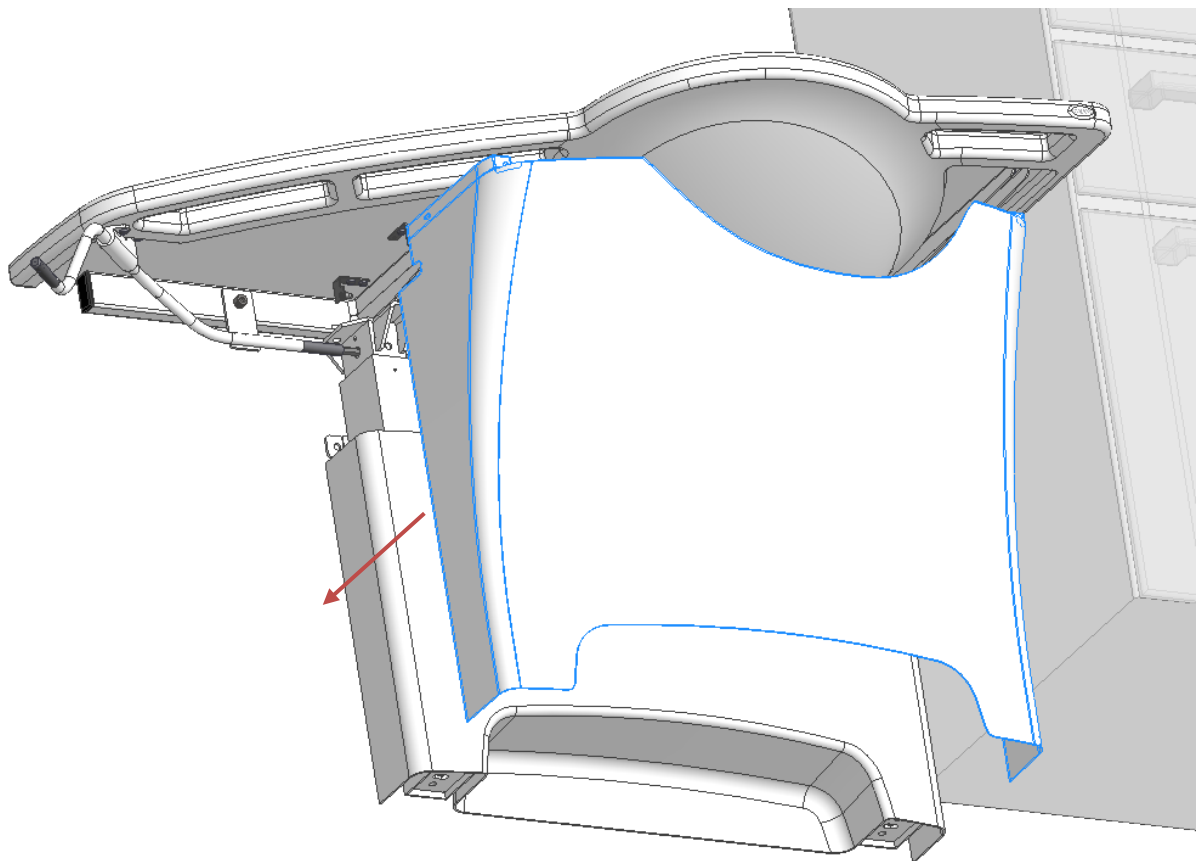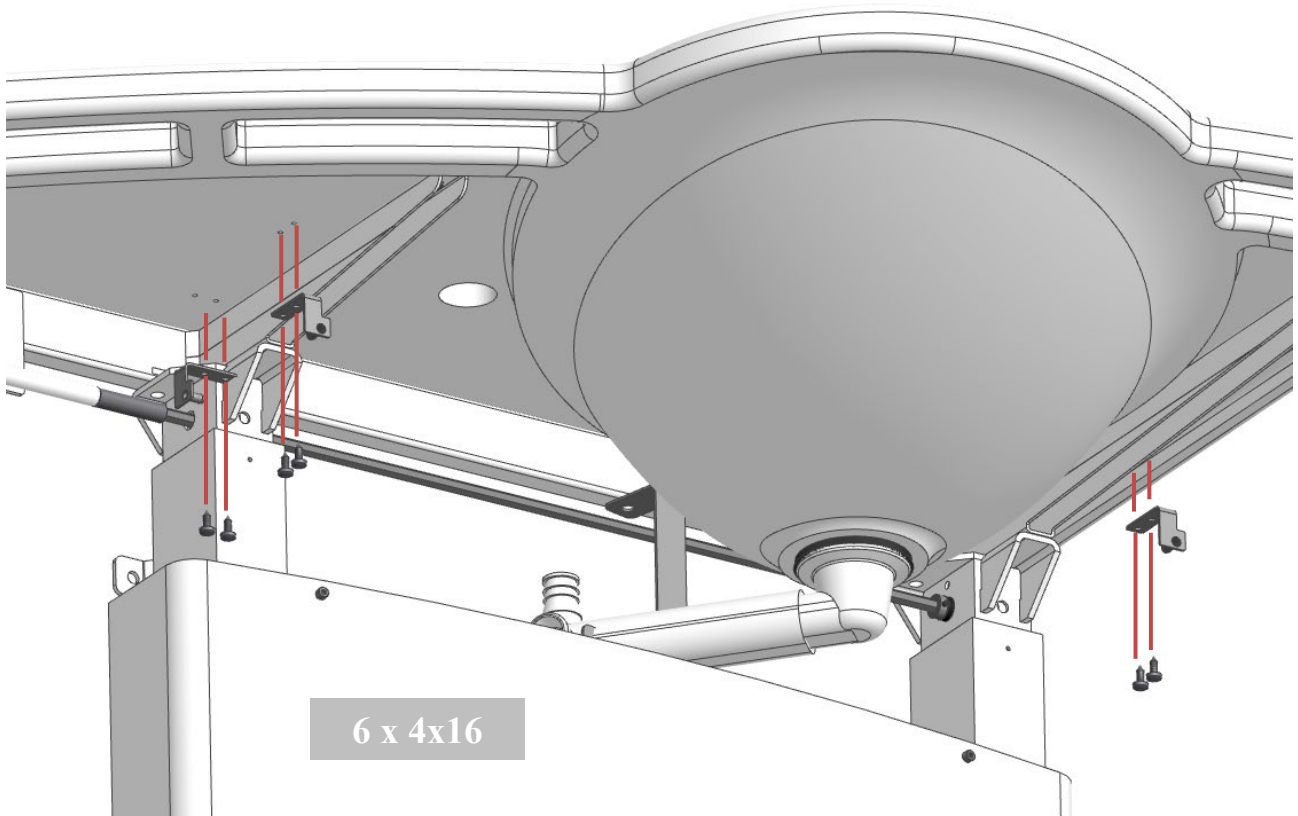

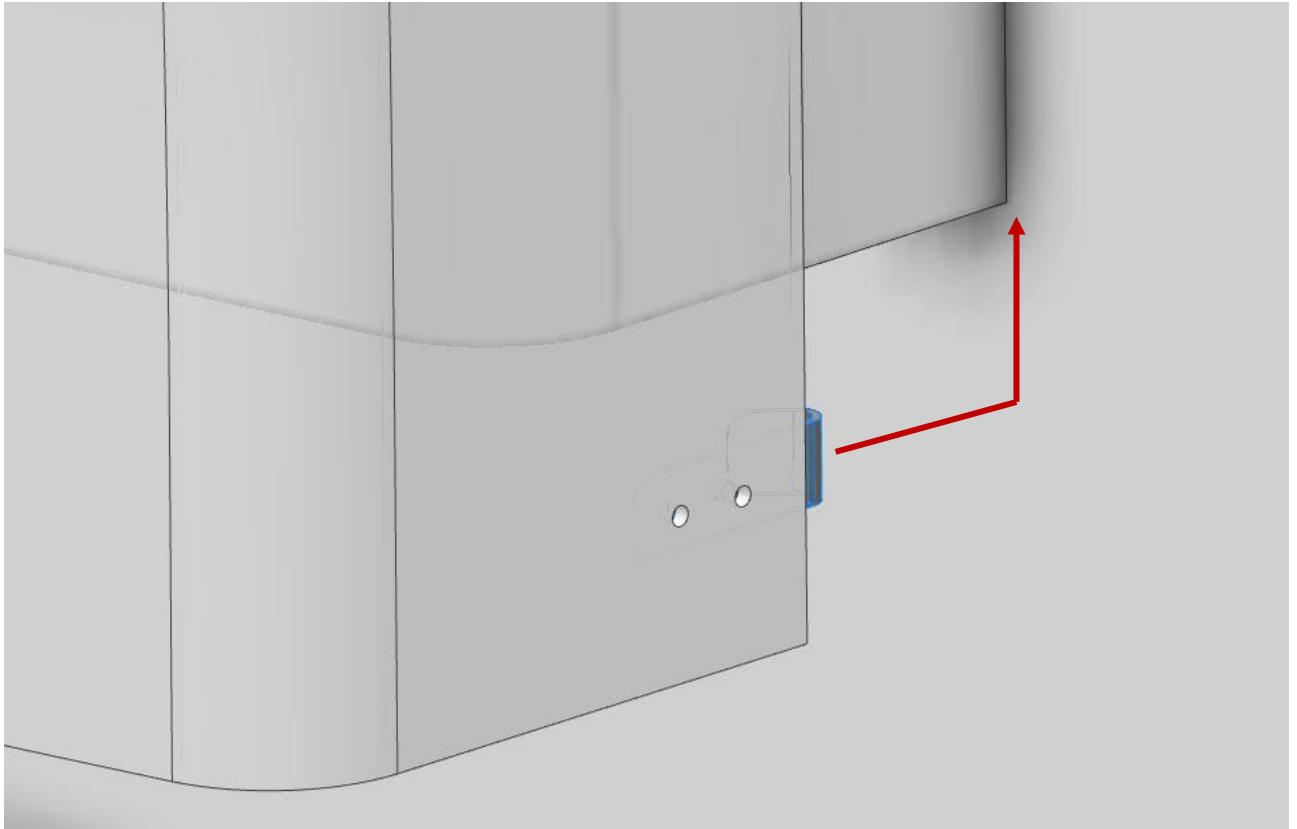

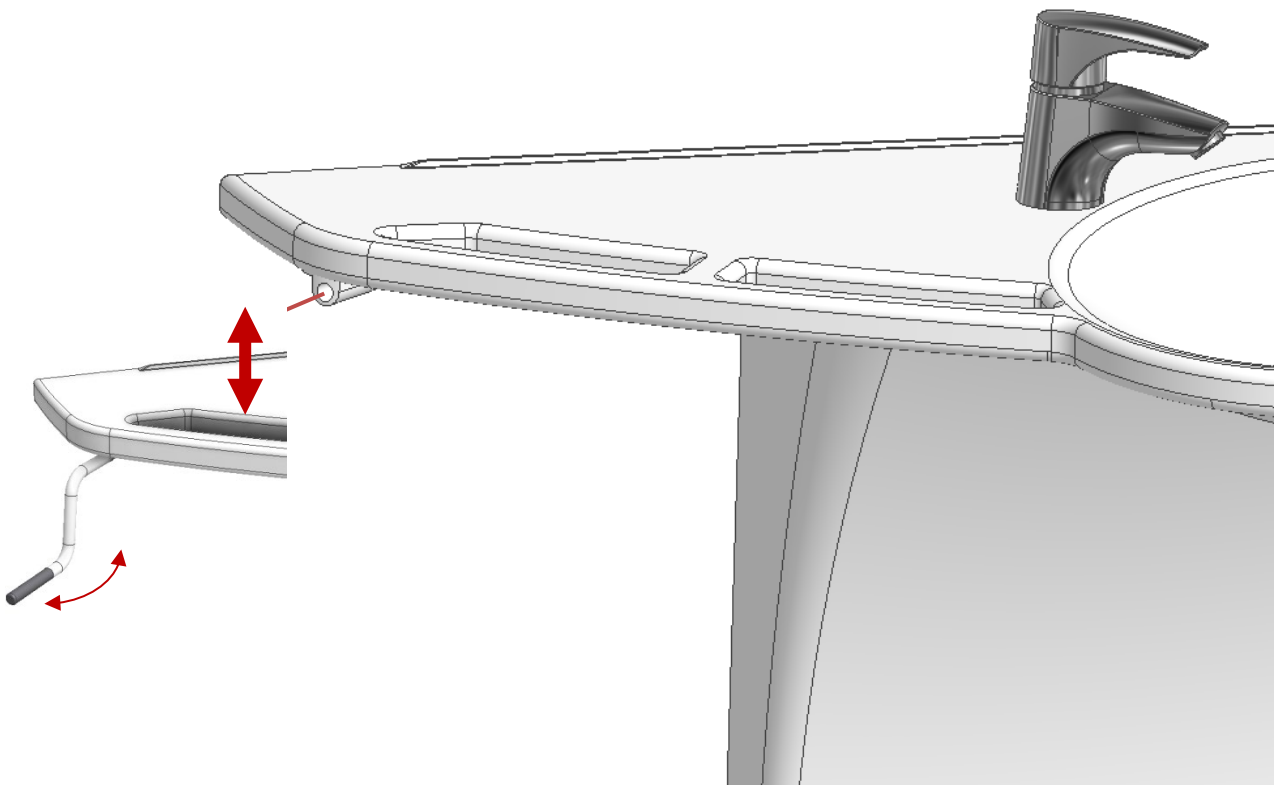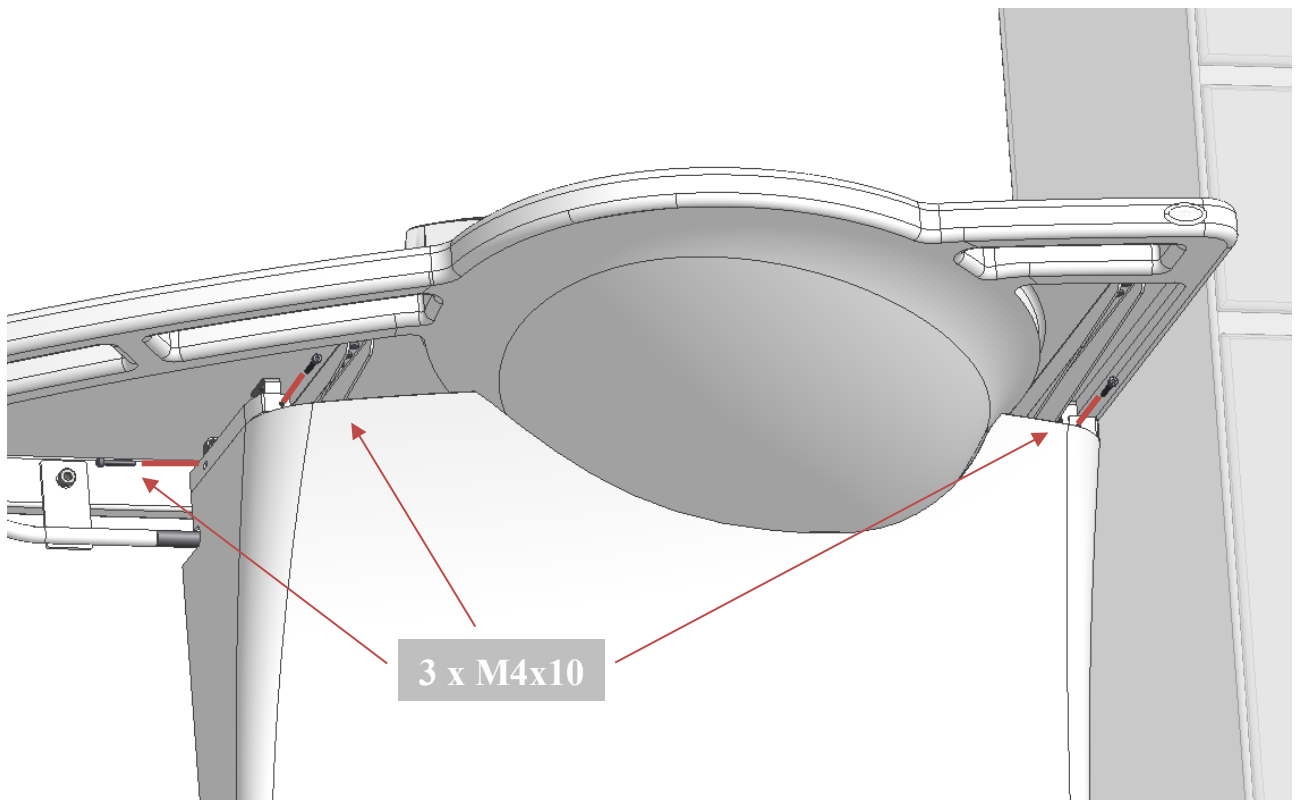

5. Test de performance

Une fois l'installation terminée et avant utilisation, toutes les fonctions du lavabo Ropox Support doivent être testées. Après cela, un test de performance doit être effectué au moins une fois par an par le personnel compétent.

1. Vérifiez que les instructions de montage ont été respectées.
2. Vérifiez que tous les boulons et vis ont été serrés.
3. Vérifiez que tous les drains et tuyaux ont été correctement connectés.
4. Assurez-vous qu'il n'y a pas de charge sur le cadre.
5. Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche le cadre de se déplacer librement dans la plage de réglage de la hauteur.

Lorsque ces tests ont été effectués avec succès, Ropox Support Washbasin est prêt à l'emploi. See Section « Safety in usage ».

6. Sécurité d'utilisation

- Le lavabo Ropox Support ne doit être réglé en hauteur que par des personnes qui ont lu et compris ces instructions.
- Certains modèles de lavabo Ropox Support sont réglables en hauteur et ne doivent pas être utilisés comme table élévatrice ou personne élévateur.
- Utilisez toujours le lavabo d'une manière excluant le risque de dommages aux personnes ou aux biens. La personne qui utilise le lavabo est responsable d'éviter les dommages ou les blessures.
- Si le lavabo est utilisé dans des endroits accessibles au public où des enfants ou des personnes à capacité d'observation réduite peuvent s'en approcher, la personne qui utilise le lavabo doit faire attention aux personnes présentes afin de prévenir les situations dangereuses.
- Assurez-vous qu'il y a de l'espace libre au-dessus et au-dessous du lavabo pour permettre le réglage de la hauteur.
- Ne surchargez pas le bassin de cendres Ropox Support Wet assurez-vous que la répartition de la charge est correcte.
- N'actionnez pas le lavabo en cas de défauts ou de dommages.
- Les modifications susceptibles d'influencer les performances ou la conception du lavabo Ropox Support ne sont pas autorisées.
- Sachez que le lavabo devient glissant lorsqu'il est mouillé.
- Sachez que s'il y a de l'eau dans le lavabo lorsqu'il est ajusté en hauteur, elle peut se répandre sur le sol.
- Sachez que si le drain s'arrête lorsque l'eau coule, le sol sera mouillé.
- L'installation, l'entretien et les réparations doivent être effectués par un personnel compétent.
- Pendant l'inspection, l'entretien ou les réparations, toute charge doit être retirée du lavabo Ropox Support.

7. Service et maintenance

7.1 Nettoyage

Essuyez le lavabo Ropox Support avec un chiffon essoré avec de l'eau tiède et un détergent doux. N'utilisez pas d'enchantements, d'abrasifs ou de chiffons, de brosses et d'éponges.

7.2 Nettoyage du dessus de table et du lavabo

Ropox Support Lavabo est fait d'un matériau composite de marbre et de granulés de plastique avec une surface de gel. Cela donne une finition dure et très résistante, facile à nettoyer. Lavez les surfaces quotidiennement avec de l'eau et séchez-les avec un chiffon. N'utilisez pas de détergents contenant des abrasifs durs, par exemple de la laine d'acier, de la poudre à récurer ou de l'acide sulfurique.

Si l'eau a une teneur élevée en calcium, des dépôts calcaires se produiront souvent. Ces dépôts doivent être éliminés au moins une fois par semaine à l'aide d'un détergent contenant de l'acide citrique, de l'acide acétique ou de l'acide phosphorique. Laissez le détergent agir pendant 5 à 10 minutes selon l'épaisseur des dépôts et nettoyez soigneusement avec une éponge à récurer douce.

La désinfection du bassin peut se faire avec des spiritueux domestiques.



Notification!

N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'abrasif, par exemple de la poudre à récurer, de la laine d'acier, de l'éponge à récurer.

Ce produit n'est pas conçu pour être stérilisé, l'autoclavage et la stérilisation au-delà du nettoyage normal peuvent éventuellement modifier la sécurité et la fonction du produit.

7.3 Inspection



Notification!

Le non-respect de l'entretien périodique peut entraîner une dégradation du fonctionnement et de la sécurité du produit.



Notification!

Ropox rendra la liste des pièces et les schémas de circuit disponibles pour l'entretien et la réparation au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Ropox pour le remplacement. Si d'autres pièces de rechange sont utilisées, la totalité de la garantie peut devenir nulle. Les réparations au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel ne peuvent être effectuées que par le personnel de service désigné de Ropox.

Le cadre du lavabo Ropox Support est sans entretien. Les pièces mobiles ont été lubrifiées à vie. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, nous recommandons une inspection du cadre une fois par an.

Annuel:

- Vérifiez que tous les boulons et vis ont été bien serrés.
- Vérifiez que le cadre se déplace librement et sans problème de bas en haut.
- Vérifiez que les tuyaux d'eau et les tuyaux de vidange sont étanches et fonctionnels.

Après chaque inspection, remplissez le calendrier d'entretien.

7.4 Calendrier des services

Service et maintenance N° de série
Date: _____
Signature: _____
Commentaires: _____

Service et maintenance N° de série
Date: _____
Signature: _____
Commentaires: _____

Service et maintenance N° de série
Date: _____
Signature: _____
Commentaires : _____

Service et maintenance N° de série
Date: _____
Signature: _____
Commentaires : _____

8. Recherche de défauts

a) Le cadre semble lâche ou instable

1. Les vis d'assemblage du cadre n'ont pas été solidement serrées.
2. Serrez toutes les vis du cadre conformément aux instructions de montage.



b) Le lavabo ne peut pas être réglé en hauteur / le réglage est très difficile

1. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets coincés empêchant le réglage.

c) Il faut trop de temps pour que l'eau quitte le lavabo

1. Vérifiez que le siphon n'est pas obstrué et nettoyez-le, si nécessaire.
2. Vérifiez que le tuyau flexible sur le mur n'a pas été positionné si haut qu'il agit comme un siphon supplémentaire. Cf. recommandation.

9. Liste des pièces détachées

Poignée M6 Article n° 96000177 S'applique uniquement à 40-44012/13	
Manivelle Article N° 20-60320-548 S'applique à 40-44014/15 uniquement	

10. Protection de l'environnement

Le produit n'est pas destiné à être éliminé comme déchet municipal. Le démontage, le tri et l'élimination appropriés des composants doivent être effectués par des professionnels de l'élimination des déchets.



Partie	Recommandation d'élimination
Bassin de cendres W	Ceramic
Unité M ain	Acier
Robinet mélangeur (accessoires)	Acier
Housse (accessoires)	Plastique

11. Plainte

Voir Conditions Générales de Vente et de Livraison sur www.ropox.dk

Service d'assistance technique :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté

**UK
CA
CE**

ROPOX A/S

Ringstedgade 221

DK – 4700 Naestved

Tél.: +45 55 75 05 00 Fax: +45 55 75 05 50

Courriel : info@ropox.dk

www.ropox.dk