



GIMA

ÉCRASE-COMPRIMÉS SILENT KNIGHT

Code:	25872
Catégorie:	Coupe-comprimés - broyeurs de comprimés
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit non médical



EAN13: 3700446000653

Descriptif: ÉCRASE-COMPRIMÉS SILENT KNIGHT

Écrase-comprimés professionnel et silencieux pour hôpitaux, il réduit les comprimés en poudre fine au bout de quelques secondes, facilement et sans effort.
Les sachets évitent la contamination croisée et la perte de médicament.
Silent Knight est livré avec 50 sachets.

Poignée ergonomique pour un emploi sans effort.
Place pour 50 sachets.
Base et poignée légères et robustes en aluminium.
Stabilité parfaite.

- étape 1: introduire les comprimés dans le sachet de l'écrase-comprimés. Soulever la poignée et déposer le sachet entre les plaques de l'écrase-comprimés pour lancer l'écrasement.
- étape 2: baisser la poignée pour écraser les comprimés.
- étape 3: baisser la poignée pour déclencher le mouvement de broyage. Baisser la poignée plusieurs fois pour broyer les comprimés en poudre fine.
- étape 4: extraire le sachet.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: