

MISE EN PLACE DU FILTRE

!
**PURGER
LE ROBINET**
!

1



Indiquer les dates de début et de fin d'utilisation du filtre sur l'étiquette du sachet et la coller sur le cahier de traçabilité.

2



Ouvrir le sachet stérile.

4



Adapter le filtre sur le raccord rapide et éliminer le sachet.

3



Indiquer à nouveau les dates de début et de fin d'utilisation sur l'étiquette du filtre.

5



Le filtre ainsi installé peut être utilisé pendant 31 jours.

Eviter de poser la main sur la jupe de protection du filtre.

Ne pas nettoyer le filtre.

Ne pas ôter le filtre avant la période des 31 jours.

Changer impérativement le filtre au 31^{ème} jour d'utilisation.