

MISE EN PLACE DU FILTRE

Ne jamais poser la douchette sur le support de son support.

Eviter de poser la main sur la jupe de protection du filtre.

Ne pas nettoyer le filtre.

Ne pas ôter le filtre avant la période des 31 jours.

Changer impérativement le filtre au 31^{ème} jour d'utilisation.



1 Indiquer les dates de début et de fin d'utilisation du filtre sur l'étiquette du sachet et la coller sur le cahier de traçabilité.



2 Ouvrir le sachet stérile.




4 Placer le filtre sur le support de douche, éliminer le sachet.



3 Adapter le filtre sur le flexible.



5 Indiquer à nouveau les dates de début et de fin d'utilisation sur l'étiquette du filtre.

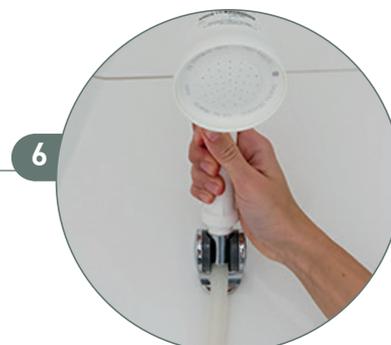

6 Le filtre ainsi installé peut être utilisé pendant 31 jours.



A la 1^{ère} utilisation, maintenir le filtre, tête de la douche en haut (cf photo) et ouvrir le robinet afin de chasser toutes les bulles d'air présentes.