

AEROSEPT 500M

Appareil de
désinfection par
voie aérienne



- Traitement d'une salle de jusqu'à 300m³
- Conforme NFT 72-281(2014)
- Procédé entièrement automatique avec pupitre manuel
- Permet d'effectuer avec les produits associés et adaptés une désinfection des surfaces
- Fonctionnement simplifié

INDICATIONS

Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.

Utilisation avec le produit de désinfection ASEPTANIOS AD (actif dès 30 minutes) et ASEPTANIOS OXY + (actif dès 15 minutes)*.

PROCÉDÉS AUX PERFORMANCES BOOSTÉES

- Chauffage de la solution à température constante de 55°C pendant toute la durée de pulvérisation.

- Concentration parfaitement stabilisée à 7ml/m³

* Se reporter au Dossier Scientifique pour consulter l'ensemble des revendications et études.



AEROSEPT 500M

Appareil de désinfection par voie aérienne

PROCÉDÉ SIMPLE

- Procédé entièrement automatisé
- Démarrage différé réglé à 1 min
- Démarrage retardé par programmateur
- Remplacement facile du bidon sans risque de projection de produit.

PROCÉDÉ SÉCURISÉ

- Arrêt automatique en fin de cycle : affichage d'une indication du bon déroulement du cycle avec demande de validation par l'intervenant.
- Pas de projection de produit : bidon équipé d'une canule évitant le contact direct avec le produit.

MODE D'EMPLOI

- Placer l'appareil dans un angle de la pièce
- Calcul automatique du temps de diffusion
- Indication du temps de diffusion
- Démarrage différé permettant de quitter la pièce avant début du traitement
- Arrêt automatique en fin de programme
- Aérer la pièce



En cours de fonctionnement



Cycle non conforme



Cycle conforme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de la réserve : bidon de 5L
- Débit nominal : 0.9L/heure
- Poids à vide : ≈ 30 Kg
- Dimensions : 900 H x 350 L x 400 P
- Alimentation : 100-240VAC - 50/60 Hz - 4.1A
- Multi-langue : Français, Anglais, Espagnol, Polonais, Turc, Portugais, Italien

RÉFÉRENCES

AEROSEPT 500.....	418.100
ASEPTANIOS OXY + (4 bidons de 5L).....	2121.795
ASEPTANIOS AD (4 bidons de 5L).....	2122.795

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions.

Les produits utilisés dans cet appareil sont Dangereux - Respectez les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.