

PROTOCOLE RETRAITEMENT DES SONDES ENDOCAVITAIRES¹

INCIDIN OXY WIPE S



Indication

Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le **nettoyage et la désinfection des surfaces en général et des dispositifs médicaux.**

Protocole d'utilisation² :

Qui : Médecin, assistante médicale ou selon protocole de l'établissement

Où : Dans la salle d'examen

Quand : A la fin de l'acte et après retrait de la gaine

Etape 1 : Préparation

- **Se désinfecter les mains** avec un produit hydroalcoolique.
- Prendre le paquet de **lingettes INCIDIN OXY WIPE S.**
- Imprégner un support d'essuyage (ex : compresse...) ³ avec de **l'eau de qualité microbiologique maîtrisée** (eau filtrée à 0,2µm ou eau stérile) ³

Etape 2 : Nettoyage

- Mettre des **gants à usage unique.**
- **Retirer la gaine de protection** de la sonde.

¹ Dispositif médical semi-critique

² Se conformer aux recommandations de l'établissement pour les dispositifs médicaux nécessitant l'usage d'une gaine de protection

³ La qualité d'eau et le type de compresse doivent être adaptée au niveau de criticité du dispositif médical traité

- Prendre une lingette INCIDIN OXY WIPE S et **essuyer le dispositif médical du plus propre au plus sale** : de la prise vers la poignée et descendre jusqu'à l'extrémité. **S'assurer que le dispositif est visuellement propre.**
- Jeter la lingette et les gants.

Etape 3 : Désinfection de niveau intermédiaire

- **Se désinfecter les mains** avec un produit hydroalcoolique.
- Mettre de **nouveaux gants**.
- Prendre une 2d lingette INCIDIN OXY WIPE S et **essuyer le dispositif médical de la prise vers la poignée et descendre vers l'extrémité.**
- S'assurer que **toutes les zones du dispositif médical ont été en contact** avec le produit.
- Respecter le **temps de contact de 30 minutes**⁴.
- Jeter la lingette et les gants.

Etape 4 : Rinçage

- **Se désinfecter les mains** avec un produit hydroalcoolique.
- **Rincer abondamment** le dispositif médical avec le support d'essuyage **imprégné d'eau de qualité microbiologique maîtrisée.**
- **Sécher** avec un support d'essuyage sec.
- **Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible** ou suivre le protocole interne de l'établissement.

Etape 5 : Environnement de travail

- Procéder au **nettoyage et à la désinfection** du clavier du moniteur de contrôle de la sonde et de **l'environnement d'examen du patient conformément au protocole de l'établissement.**

⁴ Temps de contact requis pour une désinfection de niveau intermédiaire (Bactéricidie, Fongicide, Mycobactéricide et virucide)