


ANIOS OXI'ZYME

Désinfectant
de Haut Niveau

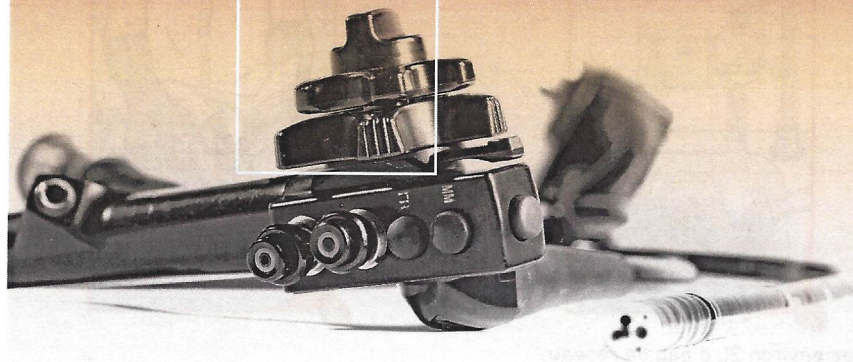

- Génération d'acide péracétique en 15 minutes
- Spectre complet en 5 minutes
- Stockage et transport optimisés
- Haute compatibilité avec les matériaux constitutifs des DM*
- Coloration rose du bain: indicateur présence produit
- Contrôle de l'efficacité du bain par bandelettes

INDICATIONS

Désinfectant de haut niveau des instruments et endoscopes thermosensibles.

CARACTÉRISTIQUES


- Absence de vapeur d'acide acétique : meilleure tolérance pour l'utilisateur.
- Maniabilité idéale.
- Efficacité du produit démontrée à 1000ppm d'Acide péracétique.
- Maîtrise de la corrosion des métaux par la présence d'agents anti-corrosifs.
- La solution une fois activée peut être utilisée durant 7 jours (avec contrôle par bandelette).

* L'ensemble de compatibilité du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.



ANIOS OXI'ZYME

Désinfectant de Haut Niveau

MODE D'EMPLOI

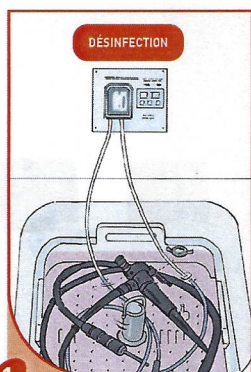

Volume du bain	Nb de triple flacons à verser
5 litres	1 triple-flacon
10 litres	2 triples-flacons
15 litres	3 triples-flacons
20 litres	4 triples-flacons

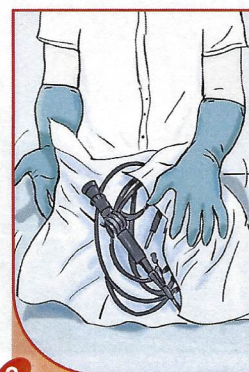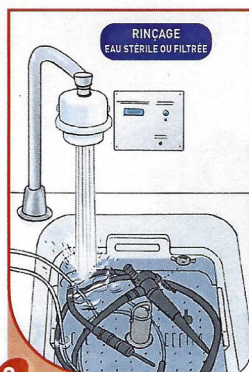

- 1 • Pour obtenir une solution homogène, remplir le bac avec environ 2L d'eau de réseau.
• Verser le contenu des trois flacons simultanément puis compléter avec l'eau pour atteindre 5L.
• Avant la 1ère utilisation, attendre **15 min. minimum** (temps nécessaire à l'activation du produit).
• Avant 1er trempage, contrôler le taux d'acide peracétique à l'aide d'une **bandelette de contrôle ANIOS OXI'ZYME**.
• Immerger le dispositif médical préalablement nettoyé et rincé.
• Respecter un temps de contact de **5 minutes**.
Pour garantir l'efficacité de la solution désinfectante, vérifier le taux d'acide peracétique à l'aide d'une bandelette, en début de séance, à la reprise d'activité après interruption et toutes les 4 heures en cas d'activité consécutive. Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.
- 2 Rincer abondamment à l'eau stérile ou filtrée selon la criticité du DM pour éliminer toute trace de produit.
- 3 Sécher soigneusement le dispositif médical.

COMPOSITION

Production extemporanée d'acide peracétique en dilution dans l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : de +5°C à +25°C.

STOCKER EN POSITION VERTICALE

Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

La solution reconstituée est :

Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min.

Levuricide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min.

Fongicide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min.

Mycobactéricide* selon EN 14348/EN 14563 en 5 min.

Virucide* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min.

Adenovirus* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min.

Norovirus* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min.

Sporicide* contre Clostridium difficile et Bacillus subtilis selon EN 17126 en 5 min.

*=conditions de propreté.

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

CONDITIONNEMENTS

- 1 12 triples-flacons Réf. 2930.804
- 2 Bandelettes ANIOS OXI'ZYME de contrôle du taux d'acide peracétique 1000 ppm (boîte de 50) Réf. 100.125



CE
0459



LABORATOIRES
ANIOS

An Ecolab Company

1, rue de l'Espoir
59260 Lezennes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

EX2930-221118-2022-Photos non contractuelles