


ANIOS RL

Rinçant
lubrifiant
de l'instrumentation

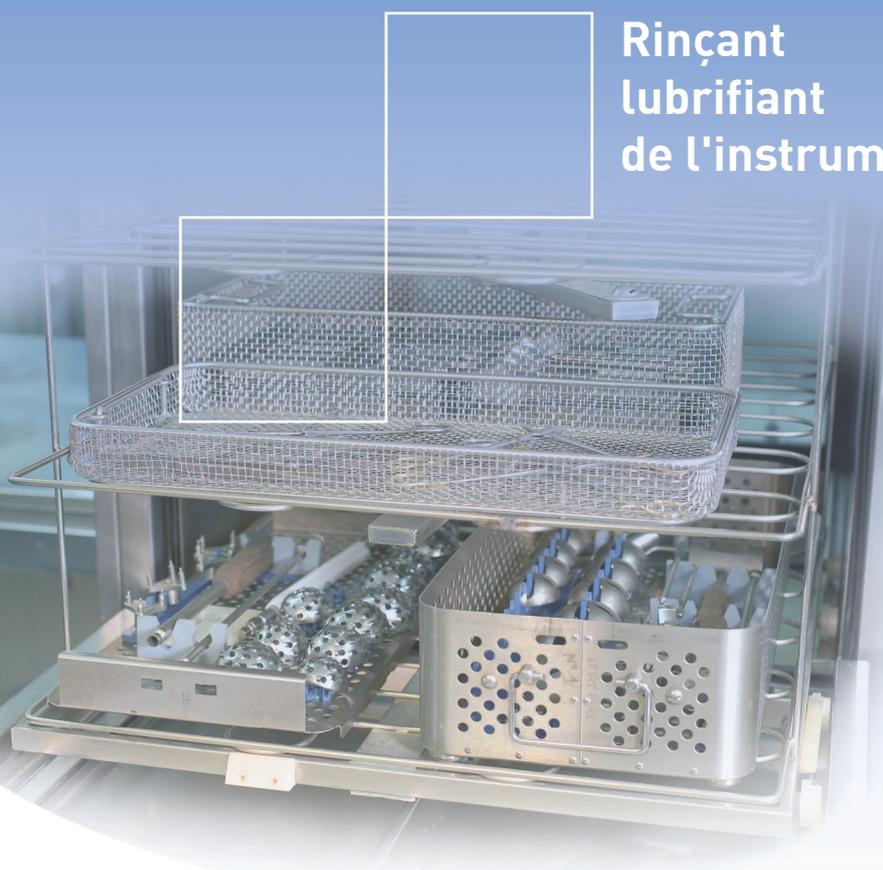

- Rinçant lubrifiant avec activateur de séchage
- Haute compatibilité avec les polysulfones
- Spécialement adapté pour une combinaison avec ANIOSYME DLM
- S'utilise dans tout type de machines

INDICATIONS

Rinçant neutre avec effet lubrifiant pour les instruments chirurgicaux et médicaux. Produit combiné qui assure un séchage rapide sans trace.

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide incolore
- pH produit pur : mini 6.5 - maxi 7.7
- Densité à +20°C: env. 1,012



DILUTION
AUTOMATIQUE
soit 0,8 à 3 ml -> 1 L



ANIOS RL

Rinçant lubrifiant de l'instrumentation

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée.

Utilisation aux dilutions de 0,08 à 0,3% en eau froide ou chaude (soit 0,8 à 3 ml par litre d'eau) selon le type de machine.

ANIOS RL est recommandé lors d'un rinçage avec une eau de qualité osmosée ou déminéralisée.

COMPOSITION

Association d'agents tensioactifs, agent antimousse, agent stabilisant, excipients.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : entre +5°C et +35°C.

Dispositif médical de classe I (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENTS

2 bidons de 5L 0315.038

1 bidon de 10L 0315.024

1 bidon de 25L 0315.018

