

# Sac ABRI.BAG « urinal »

## (équivalent d'Incobag Urinal)

### HYGIENE

**DESCRIPTION** : Le sac est conçu pour recueillir l'urine en cas de difficulté d'accès aux toilettes (patient ou résident à mobilité réduite, lors de voyage, transport etc...). Il remplace l'urinal plastique et évite son nettoyage. Il associe un sac étanche, muni de liens, à un tampon très absorbant destiné à gélifier l'urine et bloquer les odeurs.

#### HYGIENE

- Réduit les risques d'éclaboussures
- Neutralise les mauvaises odeurs et les contient
- Evite le risque de renversement grâce à la gélification du tampon

#### CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Boîte compacte adaptée à une utilisation mobile
- Format individuel pouvant facilement se porter dans une poche

#### GESTION DES DECHETS

- Fermeture hermétique et facile grâce à son système de liens
- Evite les risques infectieux et leur propagation
- Peut se jeter dans une poubelle ménagère ou avec les déchets à risques si indiqué



### DONNEES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Sac en polyéthylène, lien en coton, Tampon en non tissé à base de fluff (cellulose) et de polymères super absorbants (SAP)	<b>Dimensions</b>	Sac étanche : 16 X 38 cm (épaisseur 38 microns) Tampon : 13 X 24 cm
<b>Utilisation</b>	Usage unique	<b>Classe CE</b>	Dispositif médical classe I
<b>Absorption</b>	600 ml de solution saline à 0,9 % de NaCl - 1300 ml d'eau pure	<b>Stockage</b>	Conserver dans un local sec avec une t° entre - 20°C et + 60°C. Durée de conservation = 36 mois
<b>Origine de fabrication</b>	Fabriqué en Chine		



# Sac ABRI.BAG « urinal » (équivalent d'Incobag Urinal)

## DONNEES LOGISTIQUES

Références	Dimension sac (cm)	Unités par boîte	Unités par carton
1000010878	16 X 38	20	400

Références	Poids boîte (g)	Dimensions boîte (cm)	Dimensions carton (cm)
1000010878	450	25 X 5 X 15	52 X 27 X 32

## MODE D'EMPLOI

- Prenez un sac de la boîte
- Ouvrez le sac pour former un tube et tenez le à 2 mains.
- Vérifiez que le tampon est disposé au fond du sac.
- Urinez dans le sac.
- Attendez 1 minute que l'urine soit bien absorbée par le tampon.
- Fermez le sac en tirant sur les liens
- Une fois clos hermétiquement, vous pouvez le jeter à la poubelle.



## PRECAUTIONS D'EMPLOI


- En cas de contact oculaire, rincer abondamment l'œil et contacter un médecin.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
- Ne pas réutiliser après emploi

**Abena-Frantex SA**  
5 rue Thomas Edison  
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

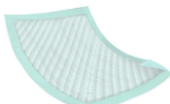

# Sac ABRI.BAG vomitoire (équivalent Incobag vomitoire)

## HYGIENE

**DESCRIPTION** : Le sac est conçu pour recueillir et sécuriser le recueil du vomi (patient à mobilité réduite, services d'urgences, lors de déplacements etc...). Il associe un sac étanche, muni de liens, à un tampon très absorbant destiné à gélifier le vomi et bloquer les odeurs.

### HYGIENE

- Le tampon absorbant absorbe les liquides biologiques et évite les risques d'éclaboussures et de dispersion des micro-organismes
- Confine les mauvaises odeurs

### CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Format individuel pouvant facilement se porter dans une poche
- Evite la corvée de nettoyage du lit, du véhicule...

### GESTION DES DECHETS


- Fermeture hermétique et facile grâce à son système de liens
- Evite les risques infectieux et leur propagation
- Poubelle ménagère ou avec les déchets à risques si indiqué



## DONNEES TECHNIQUES



<b>Composition</b>	Sac en polyéthylène, lien en coton, tampon en non tissé à base de fluff (cellulose) et de polymères super absorbants (SAP)	<b>Dimensions</b>	Sac étanche : 25 X 25 cm (épaisseur 38 microns) Tampon : 13 X 24 cm
<b>Utilisation</b>	Usage unique	<b>Classe CE</b>	<b>Dispositif médical classe 1</b>
<b>Absorption du tampon</b>	600 ml de solution saline à 0,9 % de NaCl - 1300 ml d'eau pure	<b>Stockage</b>	Conserver dans un local sec avec une t° entre - 20°C et + 60°C. Durée de conservation = 36 mois
<b>Origine</b>	Fabriqué en Chine		

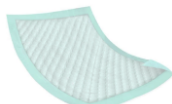

# Sac ABRI.BAG vomitoire

(équivalent Incobag vomitoire)

## DONNEES LOGISTIQUES

Références	Dimension sac (cm)	Unités par boîte	Unités par carton
1000010879	25 X 25	20	400

Références	Dimensions boîte (cm)	Dimensions carton (cm)
1000010879	25 X 15 X 5 cm	52 X 27X 32 cm




## MODE D'EMPLOI

- Prenez un sac de la boîte
- Ouvrez le sac et tenez le à 2 mains.
- Vérifiez que le tampon est disposé au fond du sac.
- Vomissez dans le sac.
- Fermez le sac en tirant sur les liens
- Une fois clos hermétiquement, vous pouvez le jeter à la poubelle (ou dans un container approprié en cas de risques infectieux).

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de contact oculaire, rincer abondamment l'œil et contacter un médecin.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
- Ne pas réutiliser après emploi

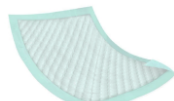

**Abena-Frantex SA**  
5 rue Thomas Edison  
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

Numéro d'article 1000018106

ABENA®

## Sac de recueil protège seau, ABENA Inco Bag, avec tampon absorbant

- Chaque sac se retire individuellement de la boîte distributrice
- Simplifie le travail du personnel d'accompagnement et de la famille
- Permet un gain de temps considérable par rapport à un lavage du seau
- Réduit le risque de contamination
- Absorption rapide et contrôle des odeurs



### Description du produit

Le sac de recueil ABENA protège seau est un sac résistant aux fuites. Il comporte des cordons de fermeture et un tampon super absorbant conçu pour recueillir, transporter et éliminer l'urine ou les matières fécales. Le sac est conçu pour s'adapter à un seau standard (chaise percée). Le tampon super absorbant absorbe rapidement les fluides corporels de manière propre et hygiénique jusqu'à 660 ml de liquides en les gélifiant, ce qui réduit considérablement le risque de contamination des seaux, ainsi que les éclaboussures et les odeurs. Les sacs se ferment facilement grâce aux cordons intégrés et peuvent être jetés dans le conteneur à déchets. Les sacs sont disponibles pour un retrait d'une seule main et donc une manipulation hygiénique. Nos sacs de recueil ABENA sont une solution facile, pratique et hygiénique pour les utilisateurs et les soignants, tout en économisant du temps et de l'argent.



### Caractéristiques

Nom de la base	Protection pour siège d'aisance
Marque	ABENA
Sous-marque	Inco Bag
Couleur	Blanc
Caractéristiques	Avec tampon absorbant
Matériau	LDPE, SAP
Longueur/profondeur	515 mm
Largeur	390 mm
Absorption Rothwell	660 ml
Certificats	CE. MD. UKCA.
Classe CE	Class I
Directives, réglementations et lois	MDR (EU) 2017/745
En raison de la composition du produit, sa date de péremption est à compter de la date de production:	5 ans
Instructions de stockage	Conserver au sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil.
Instructions d'élimination du produit	Peut être éliminé avec les ordures ménagères ou trié conformément aux consignes locales.
Instructions d'élimination de l'emballage	Peut être recyclé ou incinéré.

### Instructions d'utilisation / d'application

Retirez un sac du carton, placez-le sur la chaise d'aisance et ajustez le tampon absorbant. Après utilisation, tirez sur la ficelle et jetez le sac. Le sac convient à toutes les chaises d'aisance standard.



Les produits portant le label MD font partie des dispositifs médicaux.



Le marquage CE garantit qu'un produit est sûr à utiliser et respecte toutes les mesures de sécurité. CE signifie Conformité Européenne (European Conformity). Ce marquage est principalement présent sur les équipements électroniques, les équipements de sécurité, les produits de construction et les dispositifs médicaux.



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et est conforme à toutes les précautions de sécurité en accord avec les normes de produits et à la législation du Royaume-Uni.



Le contrôle des odeurs est un facteur essentiel permettant de garantir la discrétion à l'utilisateur. Les produits d'incontinence ABENA sont conçus et fabriqués pour garantir qu'une odeur minimale se dégage du produit.



Le produit ne contient pas de latex.



Le produit a une absorption rapide.



### Packaging data

Unit	Contains	Length	Width	Height	EAN
c/l	18 box	53 cm	45.5 cm	30.5 cm	5703538500329
box	20 pcs				5703538500312



Numéro d'article 1000018177

ABENA®

## Sac de recueil pour bassin de lit, ABENA Inco Bag, avec tampon absorbant

- Chaque sac se retire individuellement de la boîte distributrice
- Simplifie le travail du personnel d'accompagnement et de la famille
- Permet un gain de temps considérable par rapport au lavage du seuil
- Réduit le risque de contamination
- Absorption rapide et contrôle des odeurs



### Description du produit

Le sac pour bassin de lit ABENA est un sac résistant aux fuites avec des cordons de fermeture et un coussin super absorbant conçu pour recueillir, transporter et éliminer l'urine ou les matières fécales. Le sac est conçu pour s'adapter à un bassin standard. Le sac pour bassin de lit ABENA absorbe rapidement les fluides corporels de manière propre et hygiénique. La protection absorbe jusqu'à 660 ml de liquides en l'emprisonnant dans du gel, ce qui réduit considérablement le risque de contamination des bassins, ainsi que les éclaboussures et les odeurs. Les sacs sont facilement fermés avec le cordon et peuvent être jetés dans la poubelle pour déchets non recyclables. Les sacs sont emballés afin de permettre un retrait d'une seule main et donc une manipulation hygiénique. Notre sac de recueil pour bassin de lit ABENA est une solution facile, pratique et hygiénique pour les utilisateurs et les soignants, tout en économisant du temps et de l'argent.



### Caractéristiques

Nom de la base	Sac pour bassin de lit
Marque	ABENA
Sous-marque	Inco Bag
Couleur	Blanc
Caractéristiques	Avec tampon absorbant
Matériau	LDPE, SAP
Longueur/profondeur	610 mm
Largeur	390 mm
Absorption Rothwell	660 ml
Certificats	CE, MD, UKCA.
Classe CE	Class I
Directives, réglementations et lois	MDR (EU) 2017/745
En raison de la composition du produit, sa date de péremption est à compter de la date de production:	5 ans
Instructions de stockage	Conserver au sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil.
Instructions d'élimination du produit	Peut être éliminé avec les ordures ménagères ou trié conformément aux consignes locales.
Instructions d'élimination de l'emballage	Peut être recyclé ou incinéré.

### Instructions d'utilisation / d'application

Retirez un sac du carton, placez-le sur le bassin et ajustez le tampon absorbant. Après utilisation, tirez sur la ficelle et jetez le sac. Le sac convient à tous les bassins standard.



Les produits portant le label MD font partie des dispositifs médicaux.



Le marquage CE garantit qu'un produit est sûr à utiliser et respecte toutes les mesures de sécurité. CE signifie Conformité Européenne (European Conformity). Ce marquage est principalement présent sur les équipements électroniques, les équipements de sécurité, les produits de construction et les dispositifs médicaux.



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et est conforme à toutes les précautions de sécurité en accord avec les normes de produits et à la législation du Royaume-Uni.



Le contrôle des odeurs est un facteur essentiel permettant de garantir la discrétion à l'utilisateur. Les produits d'incontinence ABENA sont conçus et fabriqués pour garantir qu'une odeur minimale se dégage du produit.



Le produit ne contient pas de latex.



Le produit a une absorption rapide.



### Packaging data

Unit	Contains	Length	Width	Height	EAN
car	18 pck	53 cm	45.5 cm	30.5 cm	5703538500343
pck	1 pck				5703538500336